



Συνιστώμενος οδηγός ακολουθίας διάτρησης

για εμφυτεύματα Interna BTI



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συμβουλευτείτε το διανομέα σας για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις διάφορες αγορές

Σημάδια βάθους φρέζας

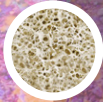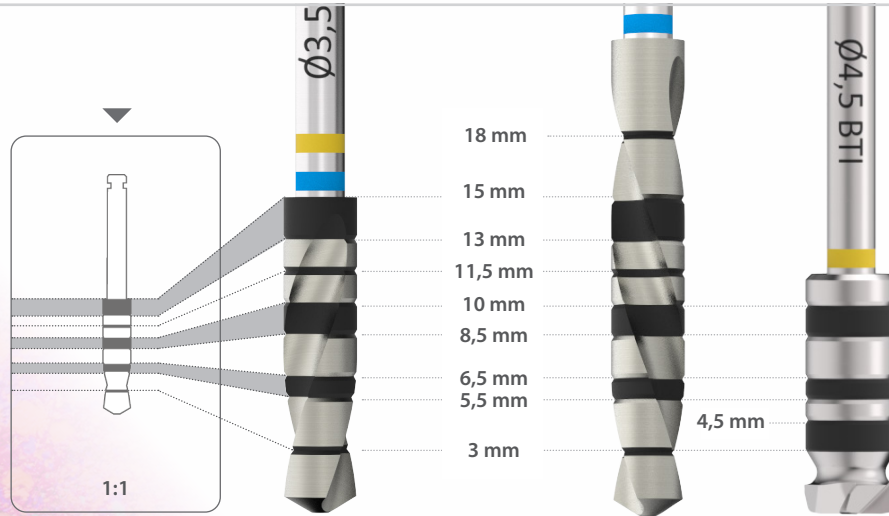

Κλάση / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

ΦΡΕΖΑ

Αρχικό τρύπανο
τρύπανο
Τρύπανο διεύρυνσης
Τρύπανο εμπρόσθιας κοπής

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΗ

ναι
όχι
όχι
όχι

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 5,5 έως 13 mm)

Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
μεταβλητή
Βάθος διάτρησης 2-3 mm


Μήκη εμφυτευμάτων	ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΟΥ	ΕΝΑΡΞΗ	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm	
5,5 - 6,5 - 7,5 mm	III							2
	II			5,5 mm				3
	0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm		6
8,5 - 10 mm	III							2
	II			6,5 mm				3
	0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm		6
11,5 - 13 mm	III							2
	II			8,5 mm				3
	0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm		6



Μήκη εμφυτευμάτων

(από 7,5 έως 13 mm)


Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
Βάθος διάτρησης 6,5 mm
Βάθος διάτρησης 2-3 mm

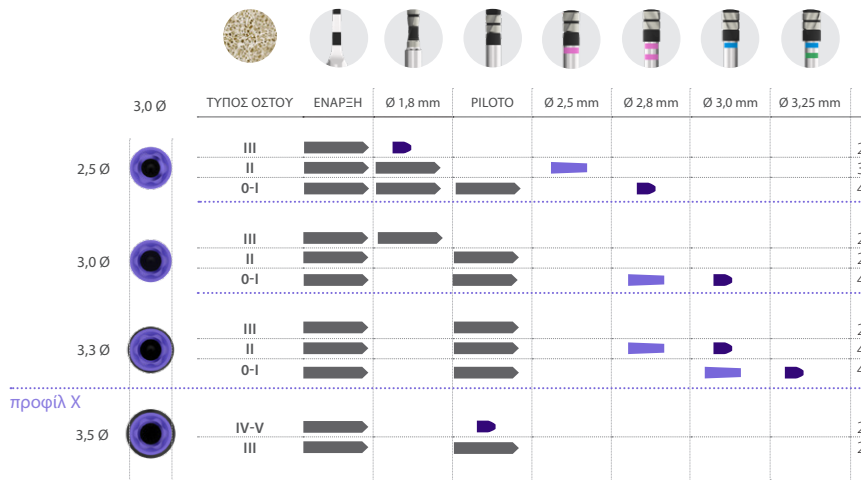

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 4,5 έως 6,5 mm)


- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- X.X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με φρέζα της καθορισμένης διαμέτρου
- Βάθος διάτρησης 2-3 mm
- Βάθος διάτρησης 2-3 mm. Μόνο για εμφυτεύματα 6,5 mm

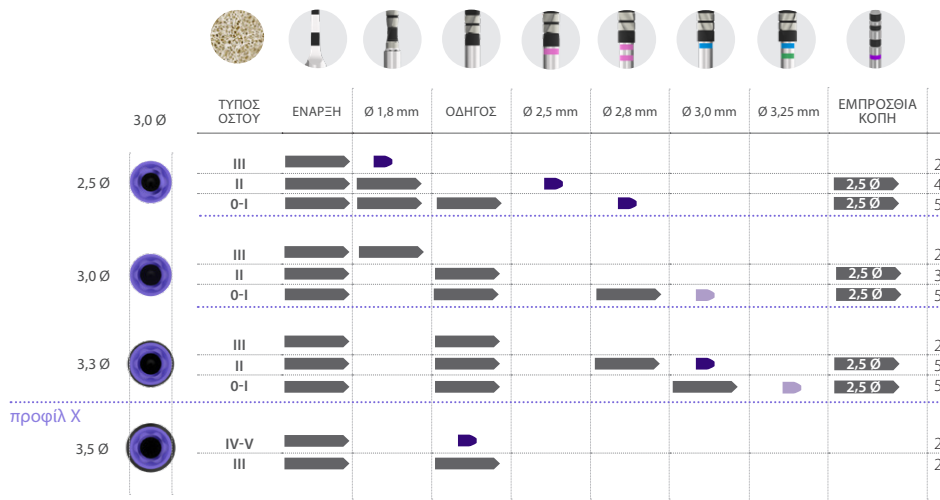

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 7,5 έως 15 mm)


Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
Βάθος διάτρησης 6,5 mm
Βάθος διάτρησης 2-3 mm

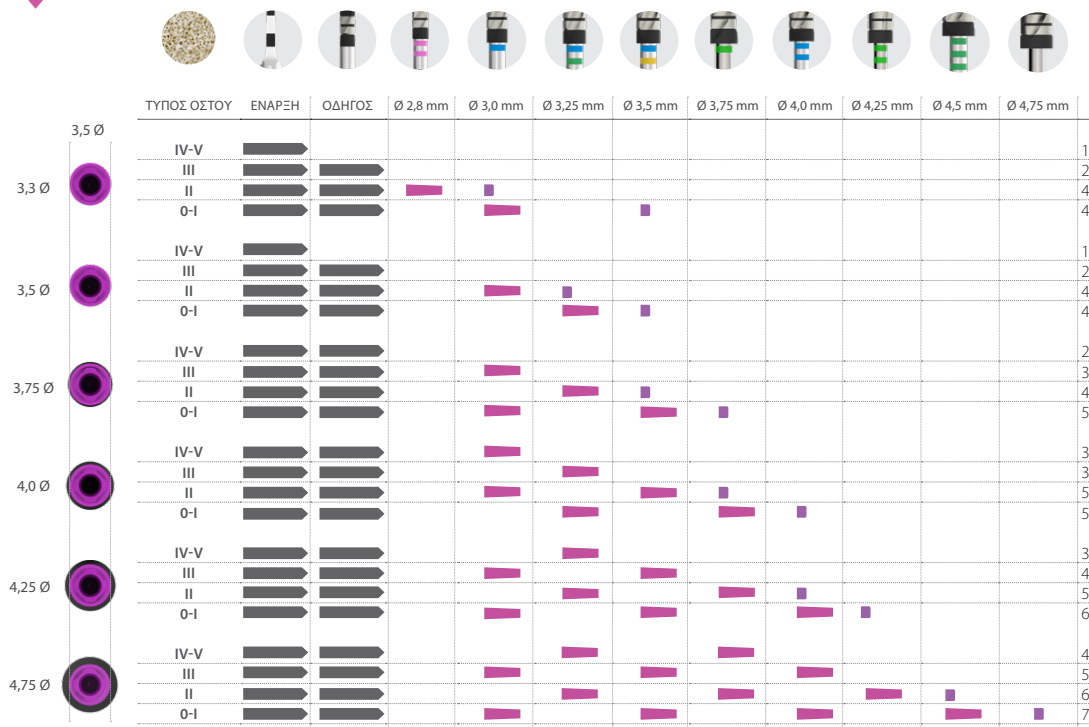

Μήκη εμφυτευμάτων

▼ (από 4,5 έως 6,5 mm)


Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
X,X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
■ Βάθος διάτρησης 2-3 mm

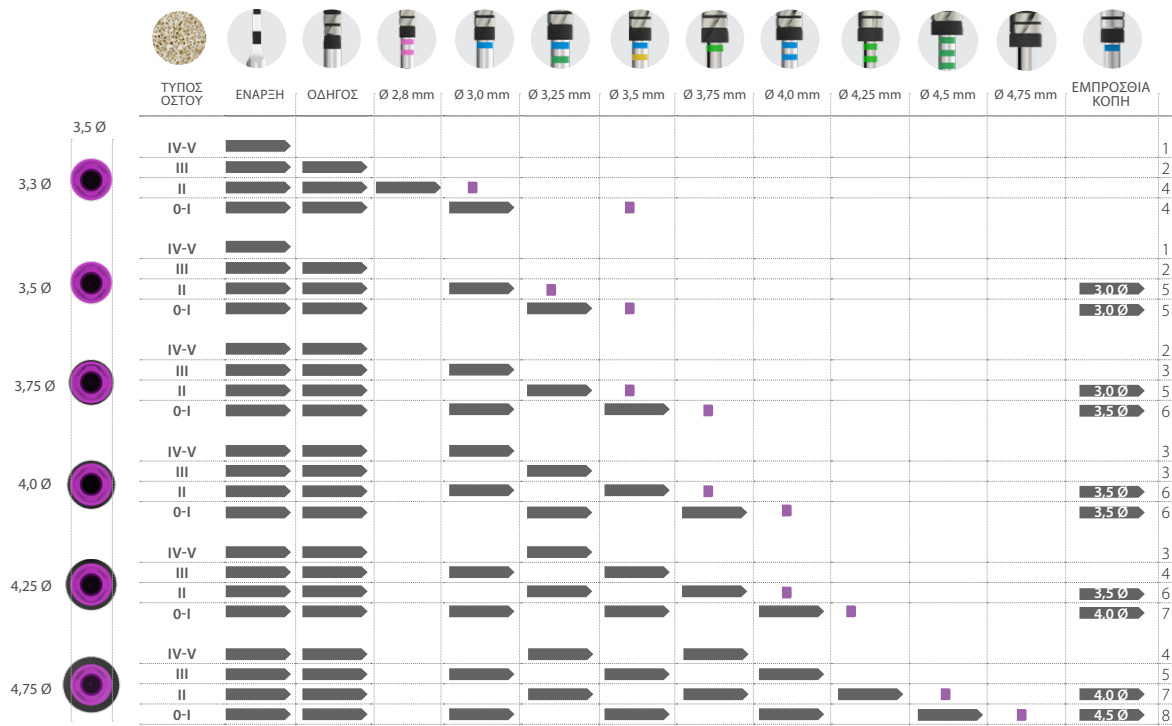

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 6,5 έως 13 mm)

Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
Βάθος διάτρησης 5,5 mm
Βάθος διάτρησης 2-3 mm

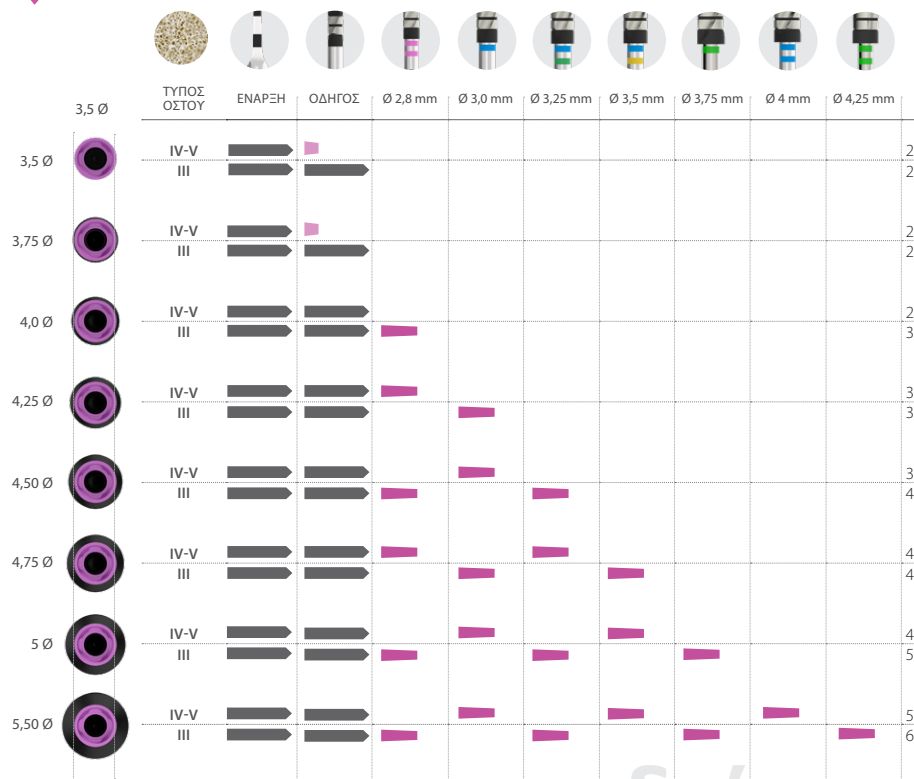

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Η αλληλουχία φρεζαρίσματος
ισχύει μόνο για τα
εμφυτεύματα **CORE-X**


διάτρησης
Οδηγός ακολουθίας



Μήκη εμφυτευμάτων

(από 4,5 έως 5,5 mm)

Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
Βάθος διάτρησης 2-3 mm

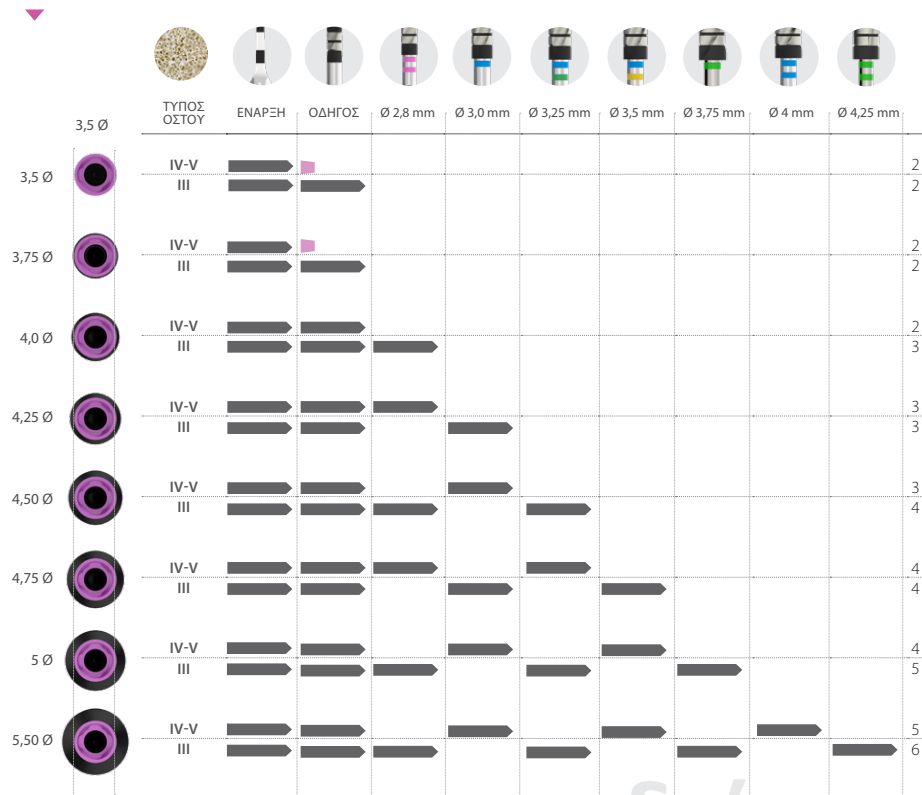

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η αλληλουχία φρεζαρίσματος
ισχύει μόνο για τα
εμφυτεύματα **CORE-X**


διάτρησης
Οδηγός ακολουθίας



Μήκη εμφυτευμάτων

(από 10 έως 15 mm)

 Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
 75% του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
 25 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
 Βάθος διάτρησης 5,0 mm

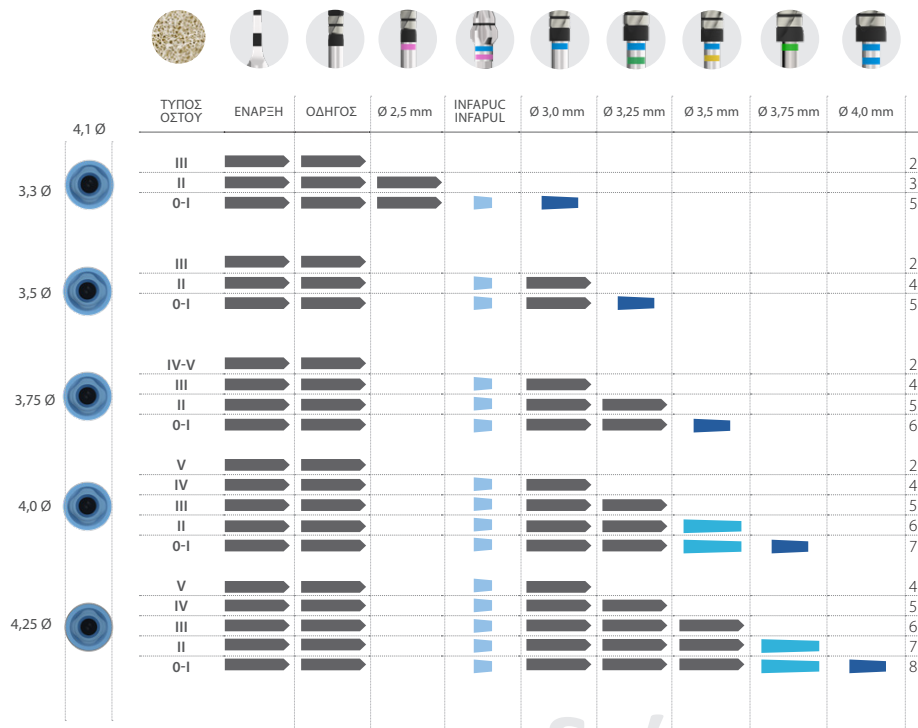


διάτρησης
 Οδηγός ακολουθίας



Μήκη εμφυτευμάτων

(από 5,5 έως 8,5 mm)

- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- X,X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
- Βάθος διάτρησης 5,0 mm
- Βάθος διάτρησης 2-3 mm

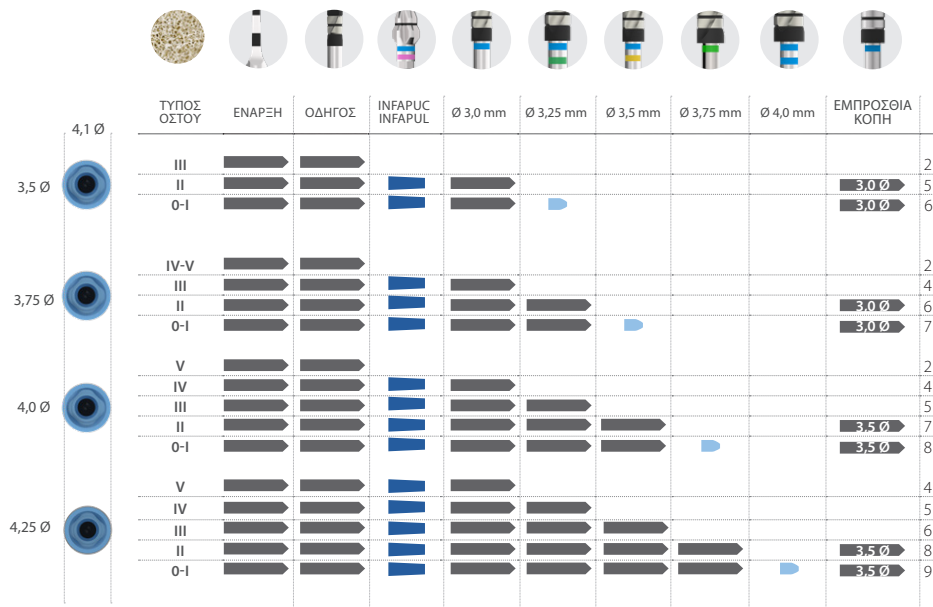




Μήκη εμφυτευμάτων

(από 8,5 έως 15 mm)



Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
Βάθος διάτρησης 6,5 mm
Βάθος διάτρησης 3 mm

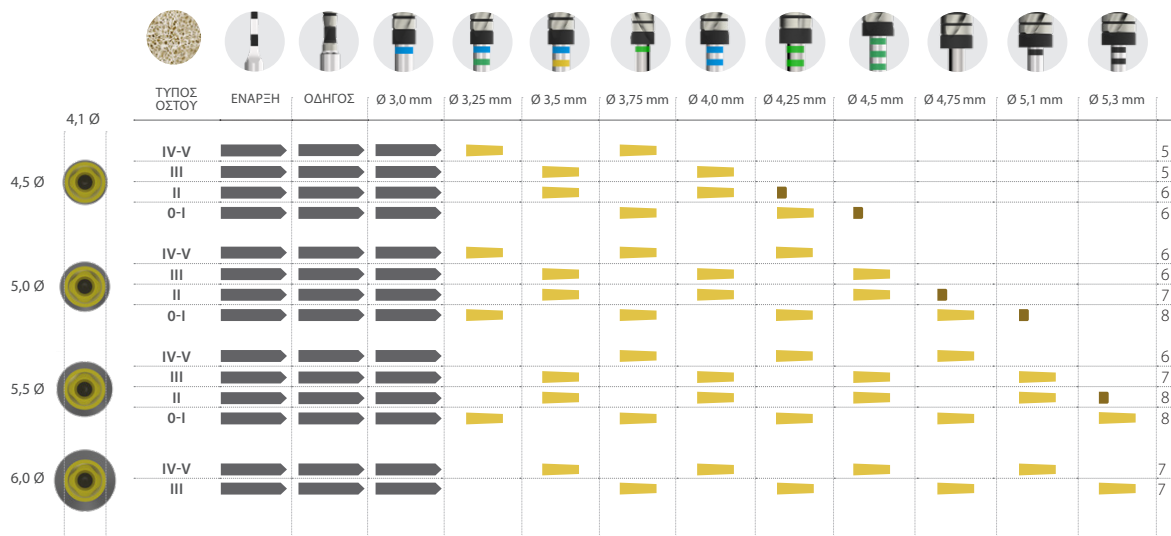

διάτρησης
Οδηγός ακολουθίας



Μήκη εμφυτευμάτων

(από 4,5 έως 7,5 mm)

Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
X X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
■ Βάθος διάτρησης 3 mm



		ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΟΥ	ΕΝΑΡΞΗ	ΟΔΗΓΟΣ	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	Ø 5,1 mm	Ø 5,3 mm	ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΟΠΗ	
4,1 Ø																
4,5 Ø		IV-V														5
		III														5
		II													4,0 Ø	7
		0-I													4,0 Ø	7
5,0 Ø		IV-V														6
		III														6
		II													4,5 Ø	8
		0-I													4,5 Ø	9
5,5 Ø		IV-V														6
		III														7
		II													5,1 Ø	9
		0-I													5,1 Ø	9
6,0 Ø		IV-V														7
		III														7

διάτρησης
Οδηγός ακολουθίας



