



Séquences de forage recommandées

pour implants BTI Interna



REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.

Marques de profondeur de forage

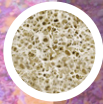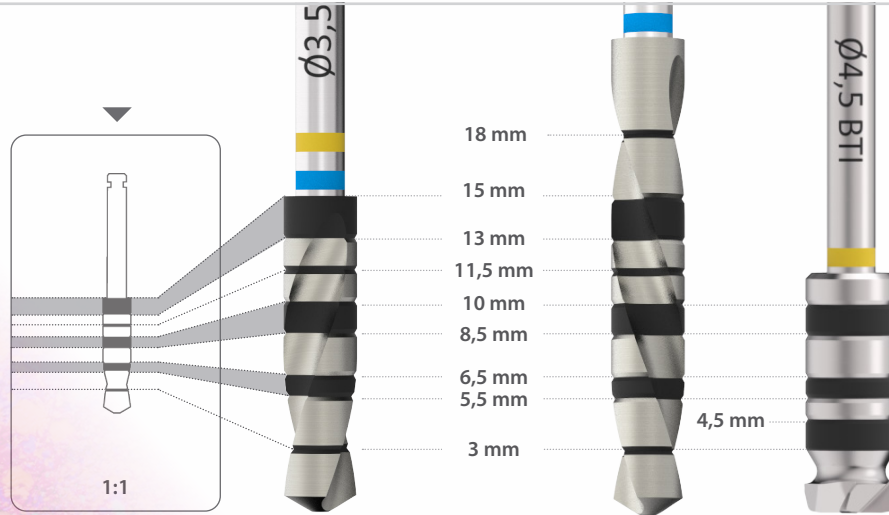

TYPE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FRET

Foret de démarrage
Forets
Fraises cuvette
Foret coupe frontale

VITESSE

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRRIGATION


oui
non
non
non



Implants de longueur

(de 6,5 à 13 mm)

Longueur totale de l'implant
 6,5 mm de profondeur de forage
 2-3 mm de profondeur de forage

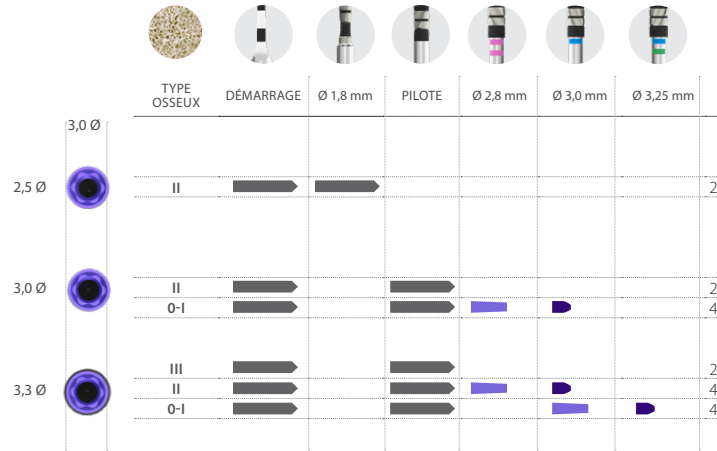

Plateforme 3.0
 Ø3,0 mm diamètre de plateforme



forage
Séquences de


bti.
 Human Technology



Implants de longueur

(de 4,5 à 5,5 mm)

 Longueur totale de l'implant
 2-3 mm de profondeur de forage

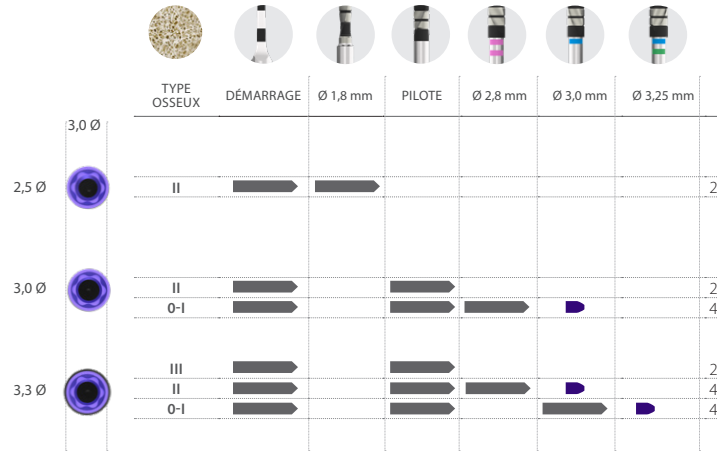




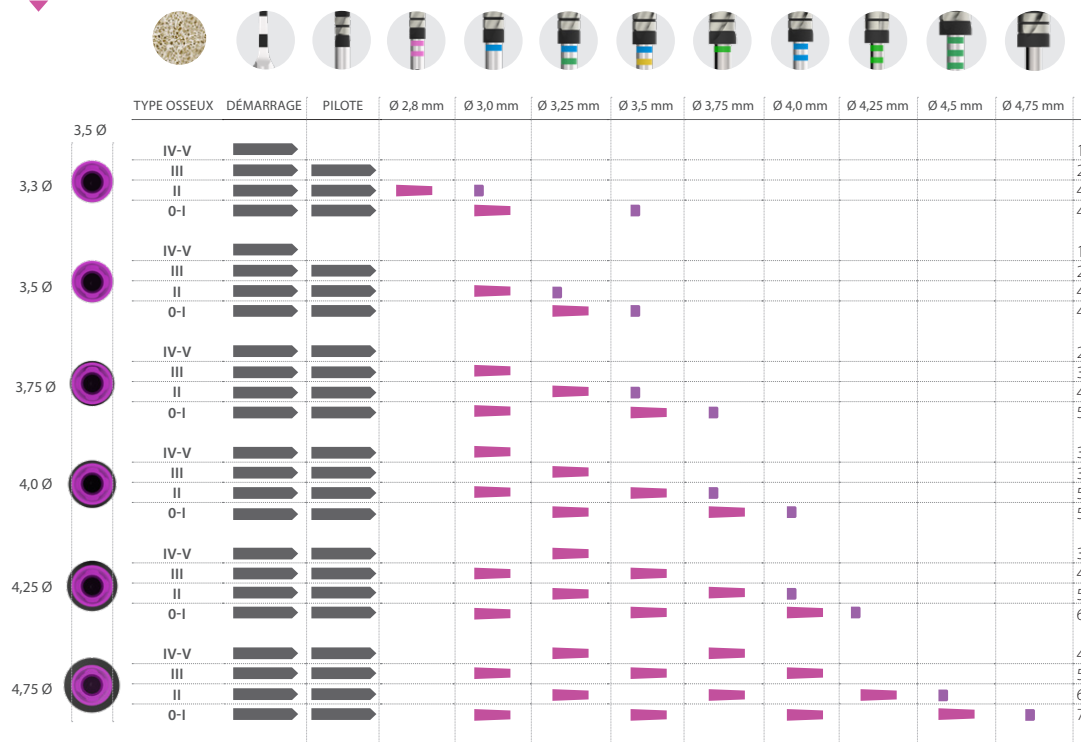

Plateforme 3.0
 Ø3,0 mm diamètre de plateforme

forage
Séquences de


bti
 Human
 Technology

Implants de longueur (de 7,5 à 15 mm)


 Longueur totale de l'implant
 6,5 mm de profondeur de forage
 2-3 mm de profondeur de forage





Implants de longueur (de 4,5 à 6,5 mm)

- Longueur totale de l'implant
- Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
- 2-3 mm de profondeur de forage

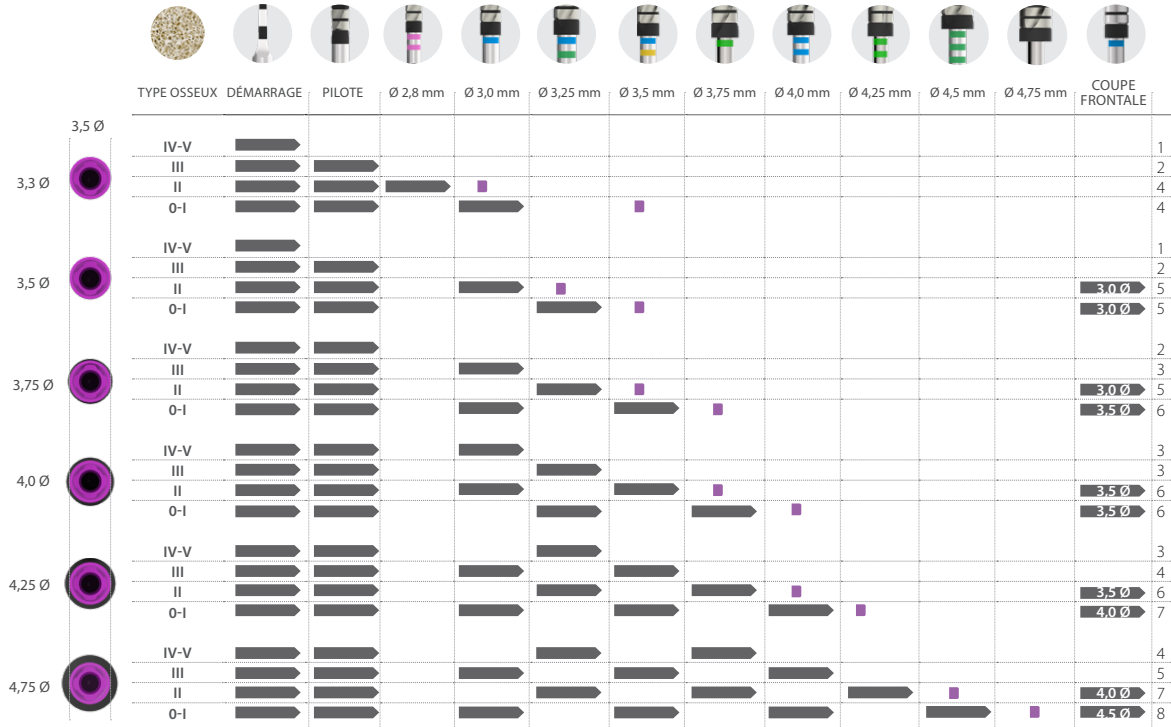




Plateforme **Étroite/CORE**
Ø3,5 mm diamètre de plateforme

forage
Séquences de



Implants de longueur (de 6,5 à 13 mm)

 Longueur totale de l'implant
 5,5 mm de profondeur de forage

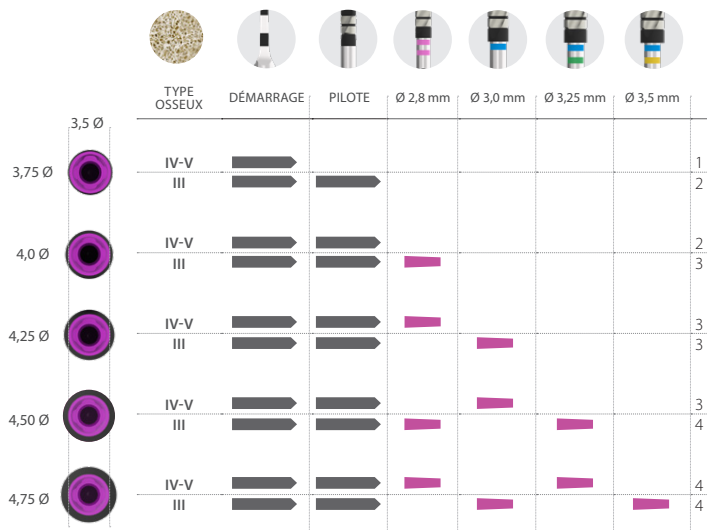


IMPORTANT:
 Séquence de fraisage valable uniquement pour les implants CORE-X[®]



Implants de longueur (de 4,5 à 5,5 mm)



➔ Longueur totale de l'implant

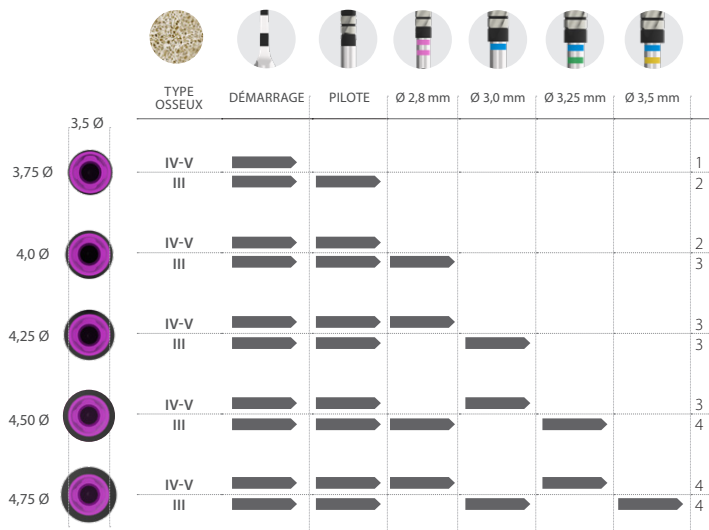

IMPORTANT:
 Séquence de fraisage valable
 uniquement pour les implants
 CORE-X®




Implants de longueur (de 10 à 15 mm)

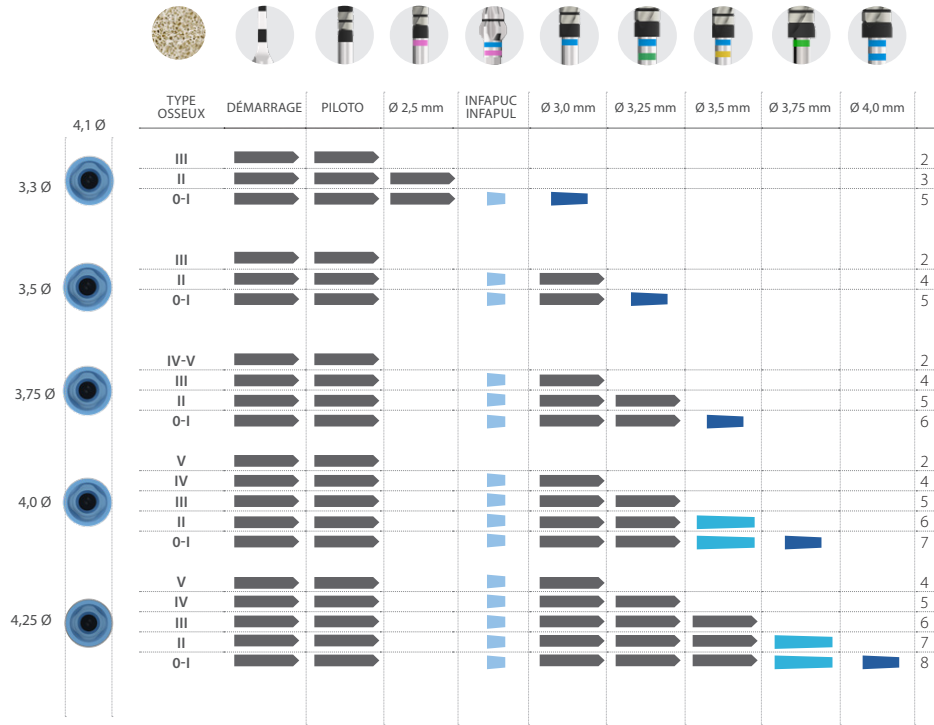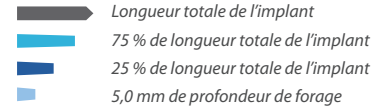



Implants de longueur (de 5,5 à 8,5 mm)

- Longueur totale de l'implant
- Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
- 5,0 mm de profondeur de forage
- 2-3 mm de profondeur de forage

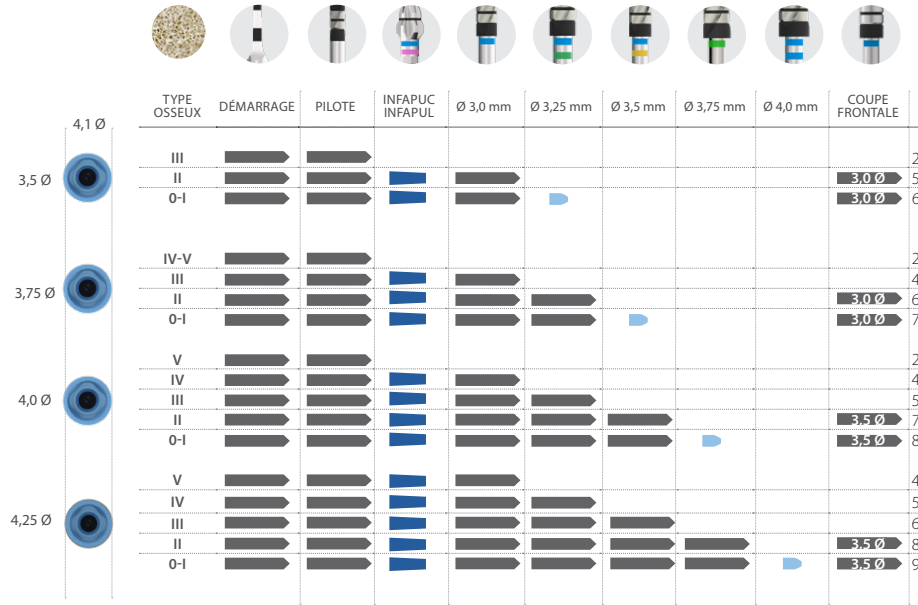




Plateforme Universelle
Ø4,1 mm diamètre de plateforme


forage
Séquences de






Implants de longueur (de 8,5 à 15 mm)

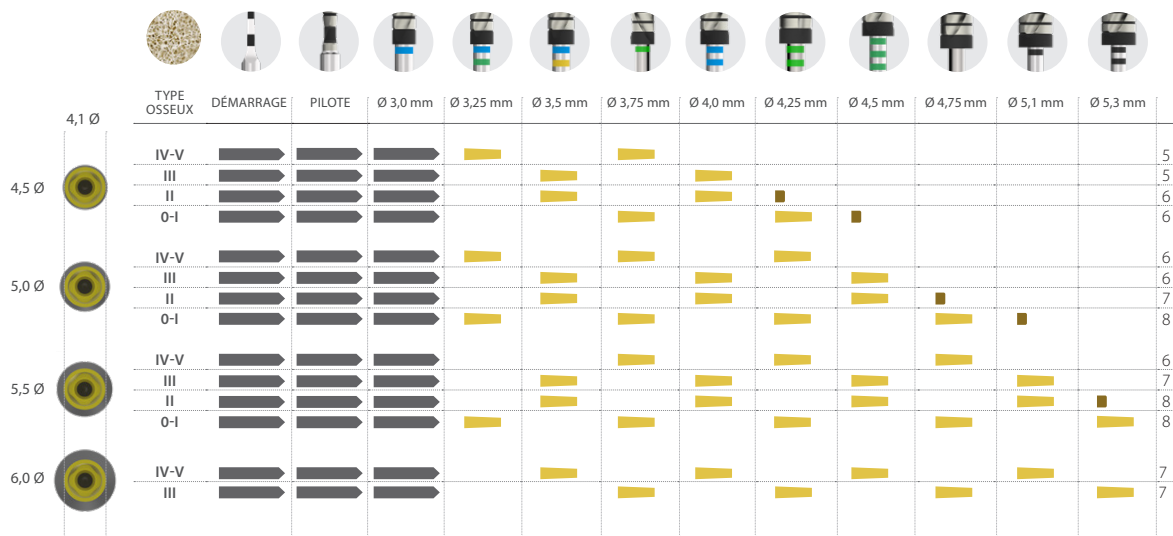

 Longueur totale de l'implant
 6,5 mm de profondeur de forage
 3 mm de profondeur de forage



Implants de longueur (de 4,5 à 7,5 mm)

-  Longueur totale de l'implant
-  Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
-  3 mm de profondeur de forage

