



Séquences de forage recommandées

pour implants BTI Interna



REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.

Marques de profondeur de forage

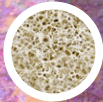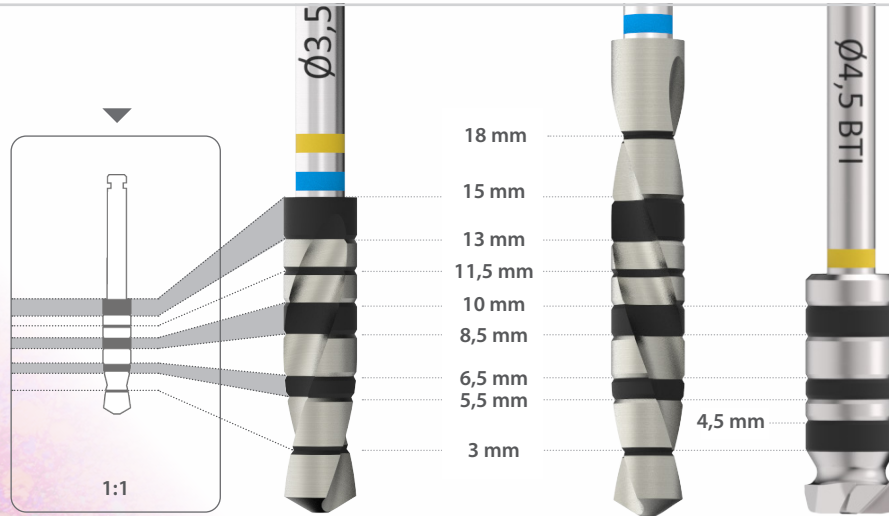

TYPE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FORET

Foret de démarrage
Forets
Fraises cuvette
Foret coupe frontale

VITESSE

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


IRRIGATION

oui
non
non
non

Implants de longueur

(de 6,5 à 13 mm)

Longueur totale de l'implant
 6,5 mm de profondeur de forage
 2-3 mm de profondeur de forage

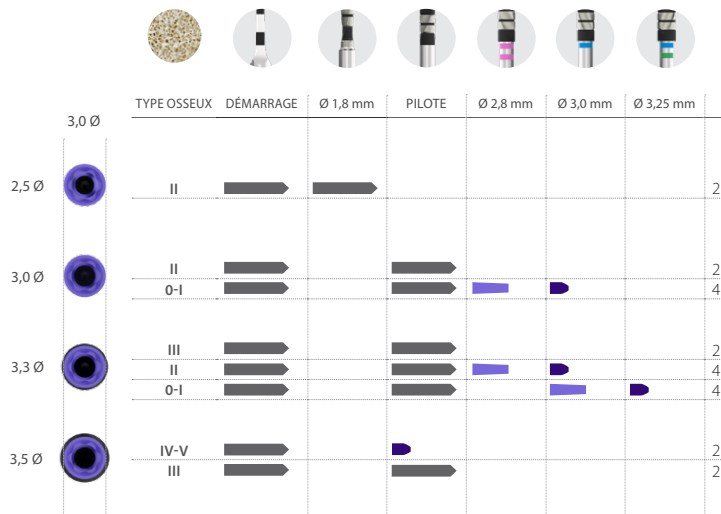


Implants de longueur

(de 4,5 à 5,5 mm)



Longueur totale de l'implant


2-3 mm de profondeur de forage

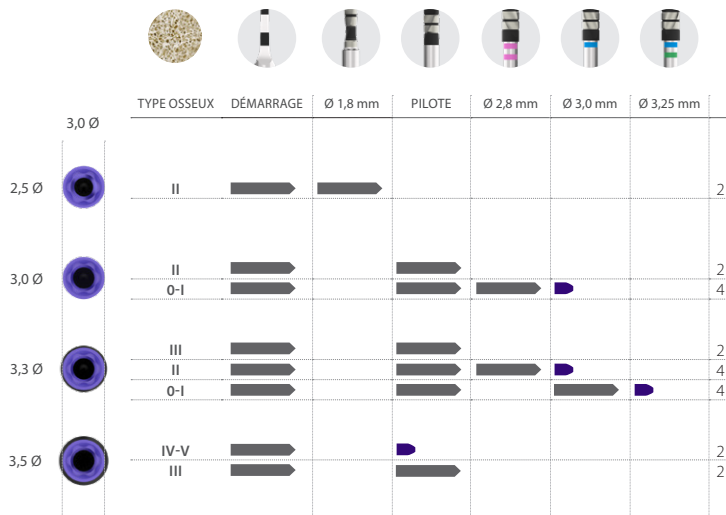

Implants de longueur

(de 7,5 à 15 mm)

Longueur totale de l'implant
6,5 mm de profondeur de forage
2-3 mm de profondeur de forage

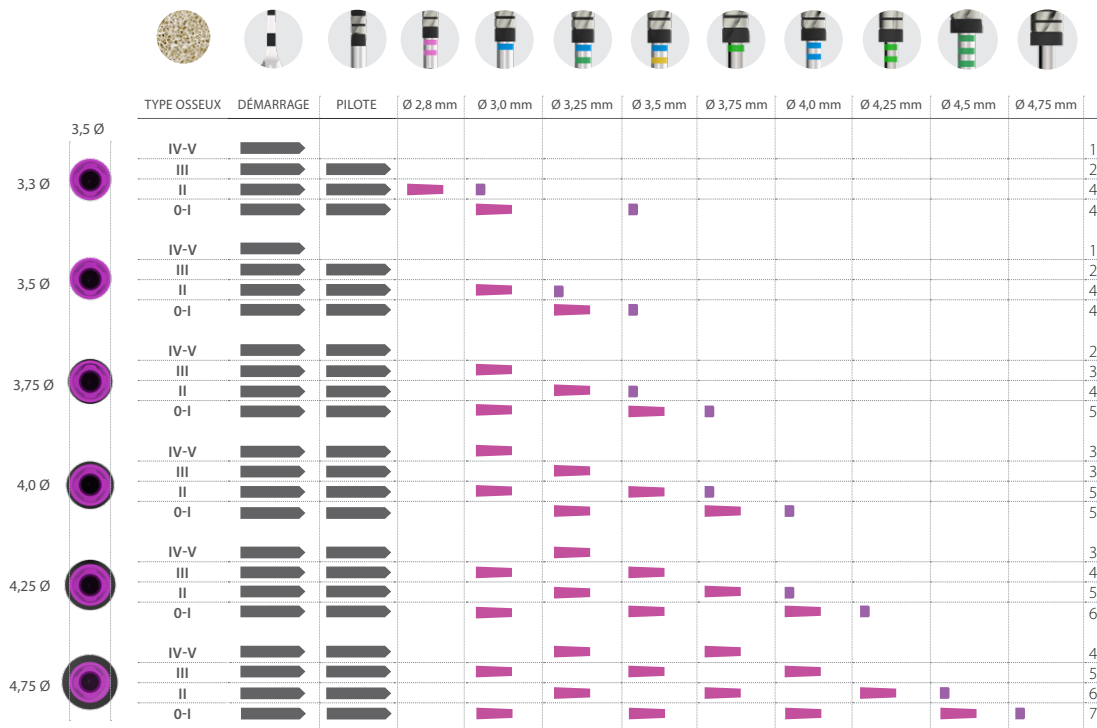

Séquences de forage



Implants de longueur

(de 4,5 à 6,5 mm)


Longueur totale de l'implant
X,X Ø Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
2-3 mm de profondeur de forage



Implants de longueur

(de 6,5 à 13 mm)

Longueur totale de l'implant
5,5 mm de profondeur de forage
2-3 mm de profondeur

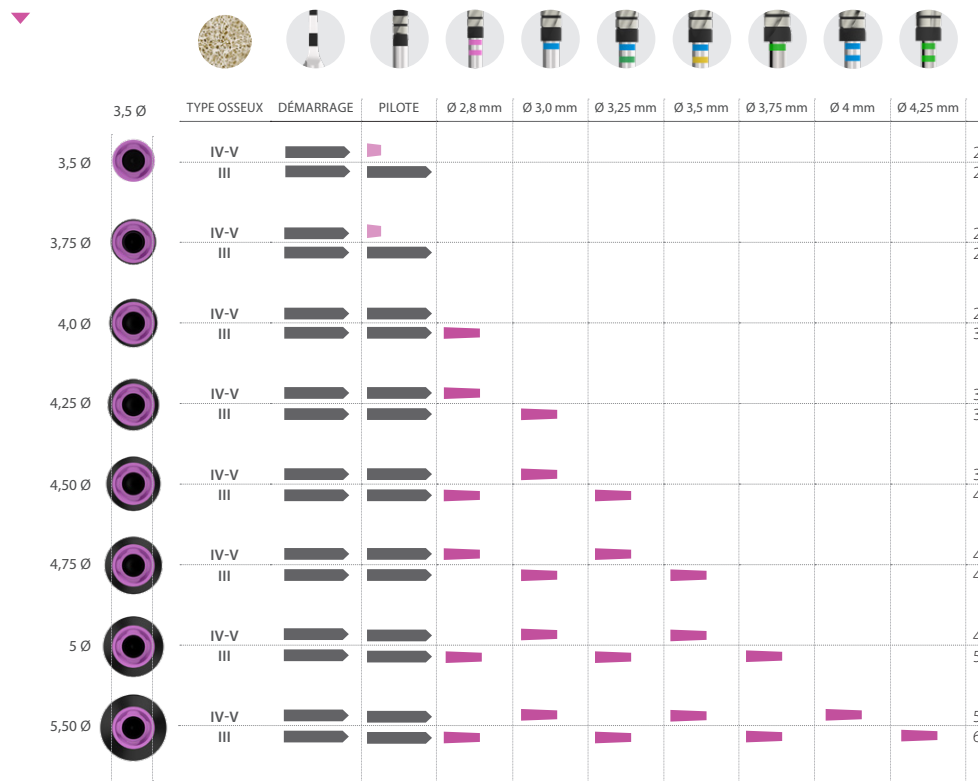

IMPORTANT:

Séquence de fraisage
valable uniquement pour
les implants CORE-X


forage
Séquences de



Implants de longueur

(de 4,5 à 5,5 mm)

Longueur totale de l'implant
 2-3 mm de profondeur

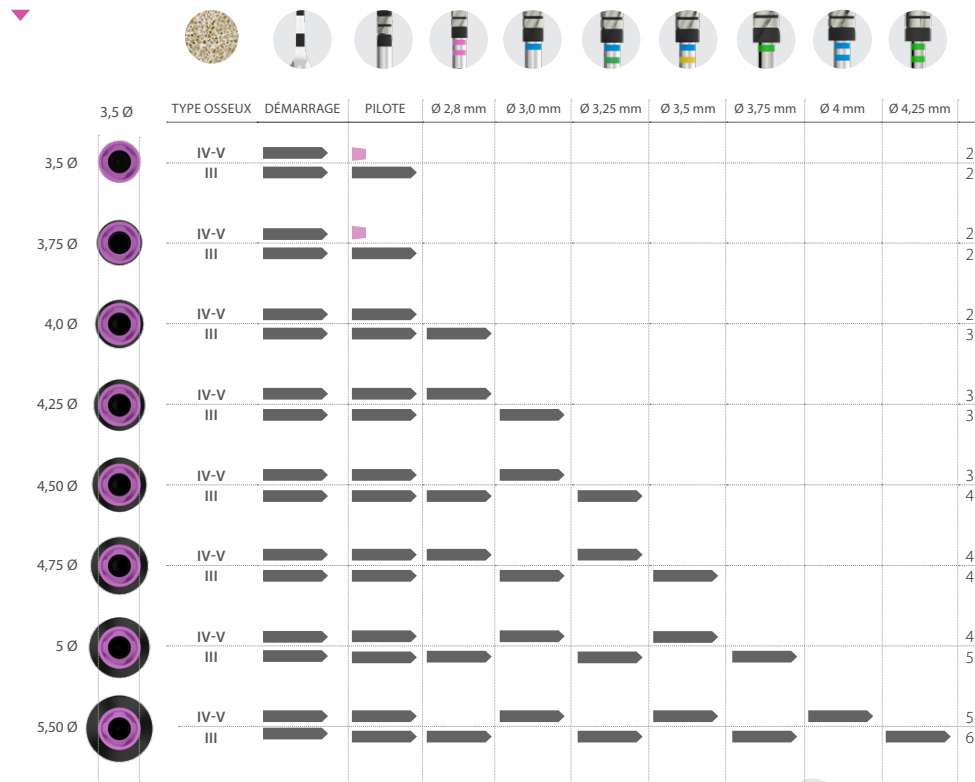



IMPORTANT:

Séquence de fraisage
 valable uniquement pour
 les implants **CORE-X**



Implants de longueur


(de 10 à 15 mm)

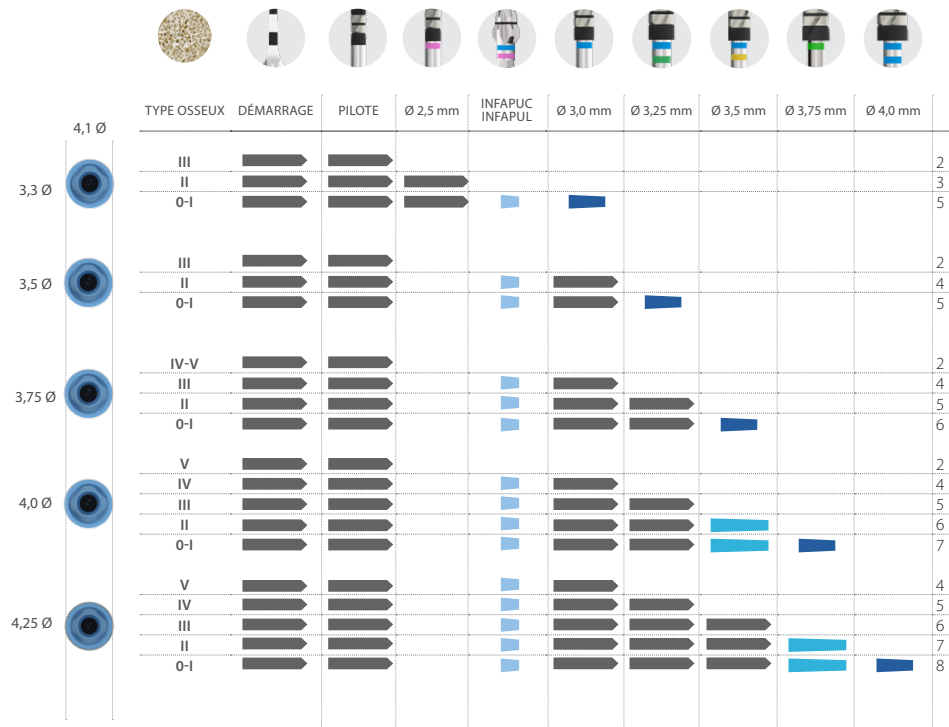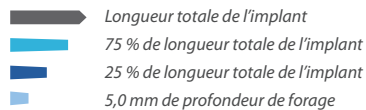

Implants de longueur

(de 5,5 à 8,5 mm)

- Longueur totale de l'implant
- X,X Ø Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
- 5,0 mm de profondeur de forage
- 2-3 mm de profondeur de forage

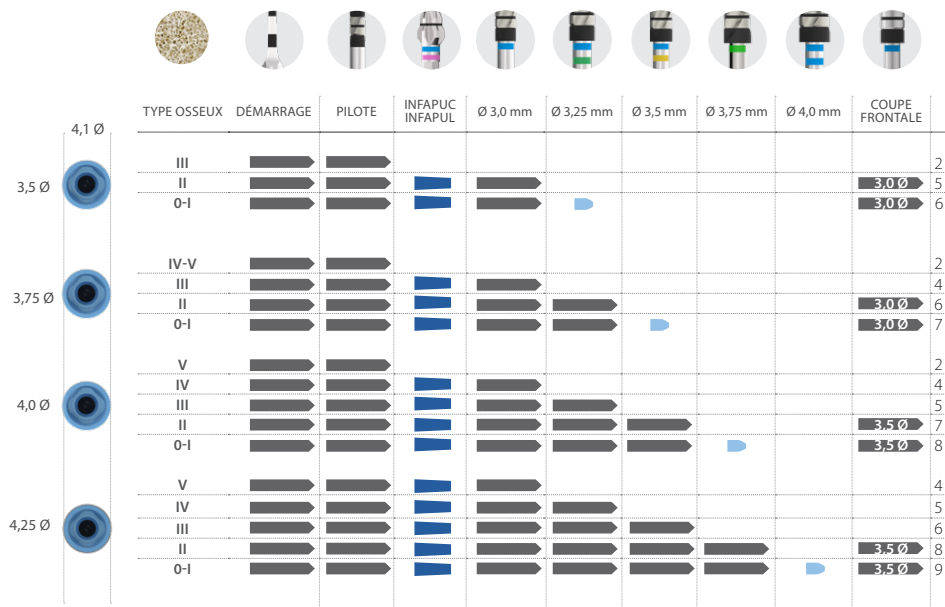




Implants de longueur

(de 8,5 à 15 mm)



Longueur totale de l'implant
6,5 mm de profondeur de forage
3 mm de profondeur de forage

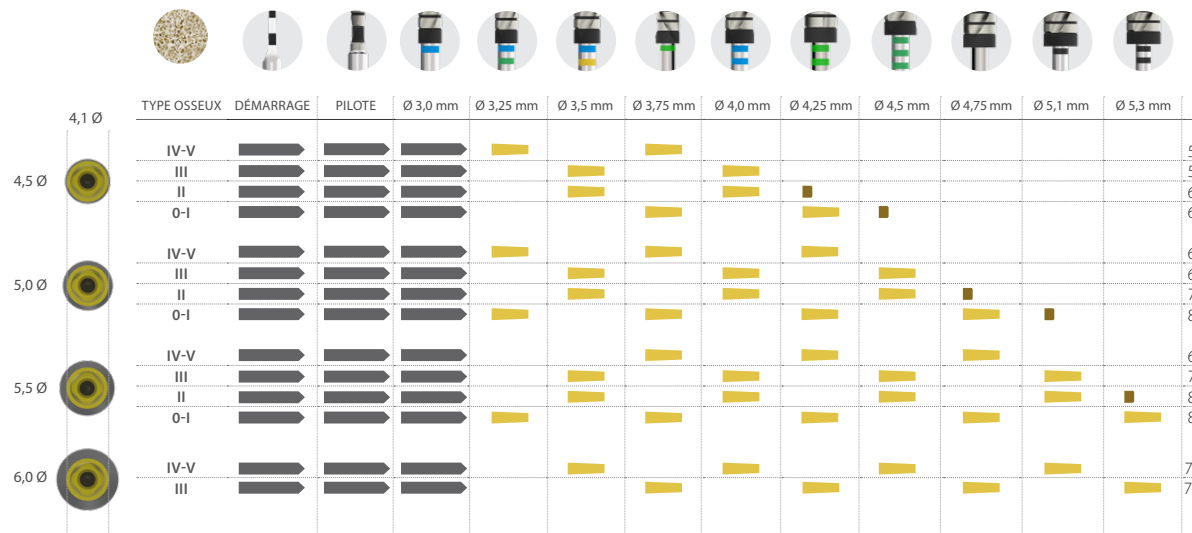

Implants de longueur

(de 4,5 à 7,5 mm)

Longueur totale de l'implant
Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
3 mm de profondeur de forage

