



# Séquences de forage recommandées

*pour implants BTI Interna*



REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.

# Marques de profondeur de forage

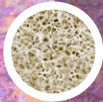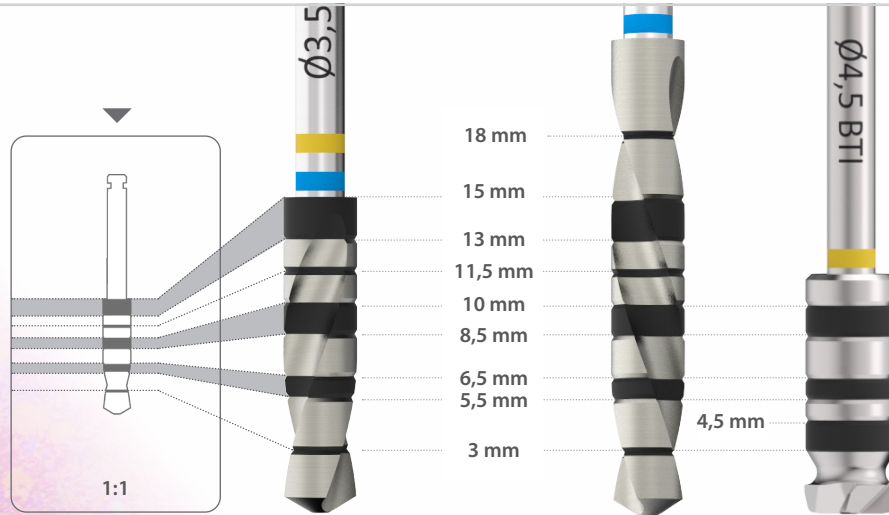

## TYPE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

## FORET

Foret de démarrage  
Forets  
Fraises cuvette  
Foret coupe frontale

## VITESSE

800 - 1.000 rpm  
50 - 75 rpm  
150 - 200 rpm  
50 - 75 rpm

## IRRIGATION

oui  
non  
non  
non

# Implants de longueur

(de 5,5 à 13 mm)

Longueur totale de l'implant  
Variable  
2-3 mm de profondeur de forage

## IMPLANTS DE LONGUEUR

5,5 - 6,5 - 7,5 mm

8,5 - 10 mm

11,5 - 13 mm

2,5 Ø




TYPE OSSEUX	DÉMARRAGE	Ø 1,8 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	Ø 2,3 mm	Ø 2,4 mm	
III							2
II			5,5 mm				3
0-I			5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm		6
III							2
II			6,5 mm				3
0-I			6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm		6
III							2
II			8,5 mm				3
0-I			8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm		6



# Implants de longueur

(de 7,5 à 13 mm)


Longueur totale de l'implant  
6,5 mm de profondeur de forage  
2-3 mm de profondeur de forage

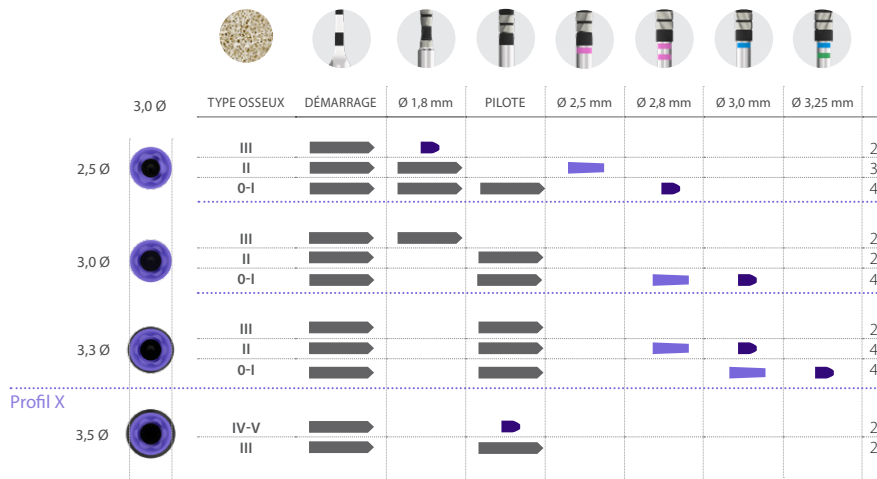

# Implants de longueur

(de 4,5 à 6,5 mm)


- Longueur totale de l'implant
- X,X Ø Longueur totale de l'implant avec fraise du diamètre spécifié
- 2-3 mm de profondeur de forage
- 2-3 mm de profondeur de forage. Uniquement pour les implants de 6,5 mm

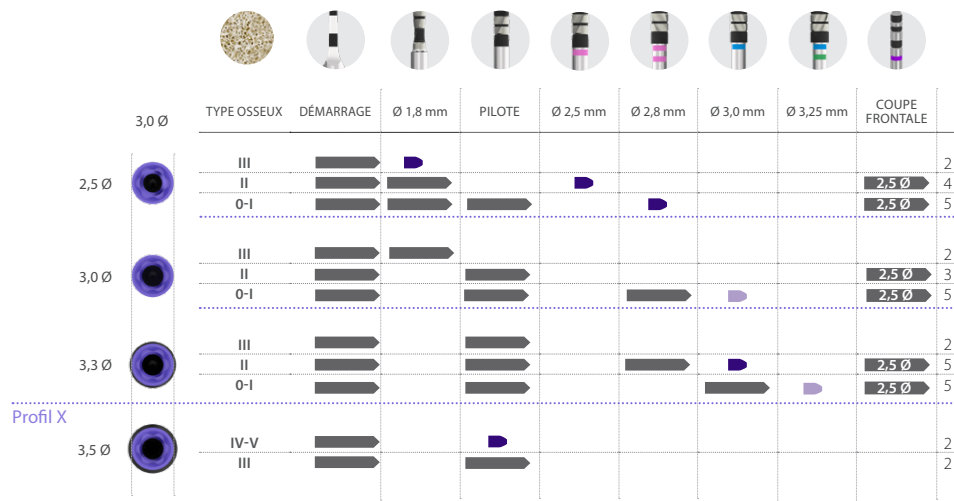

# Implants de longueur

(de 7,5 à 15 mm)

Longueur totale de l'implant  
6,5 mm de profondeur de forage  
2-3 mm de profondeur de forage

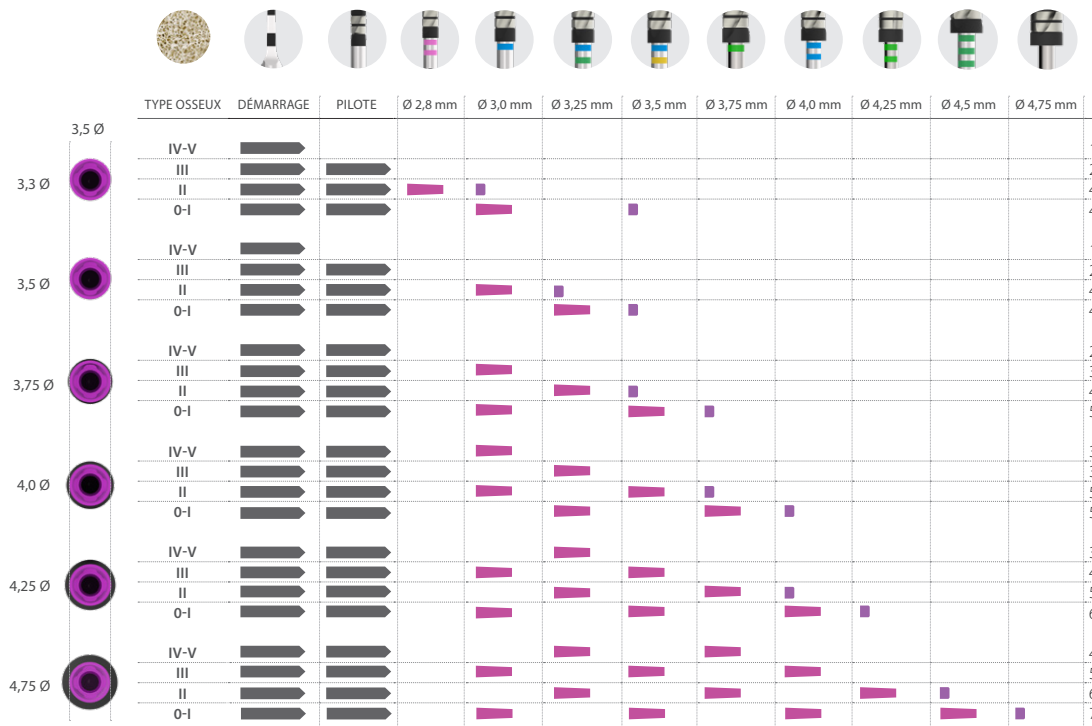


Séquences de forage



# Implants de longueur

(de 4,5 à 6,5 mm)


Longueur totale de l'implant  
X,X Ø Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié  
2-3 mm de profondeur de forage

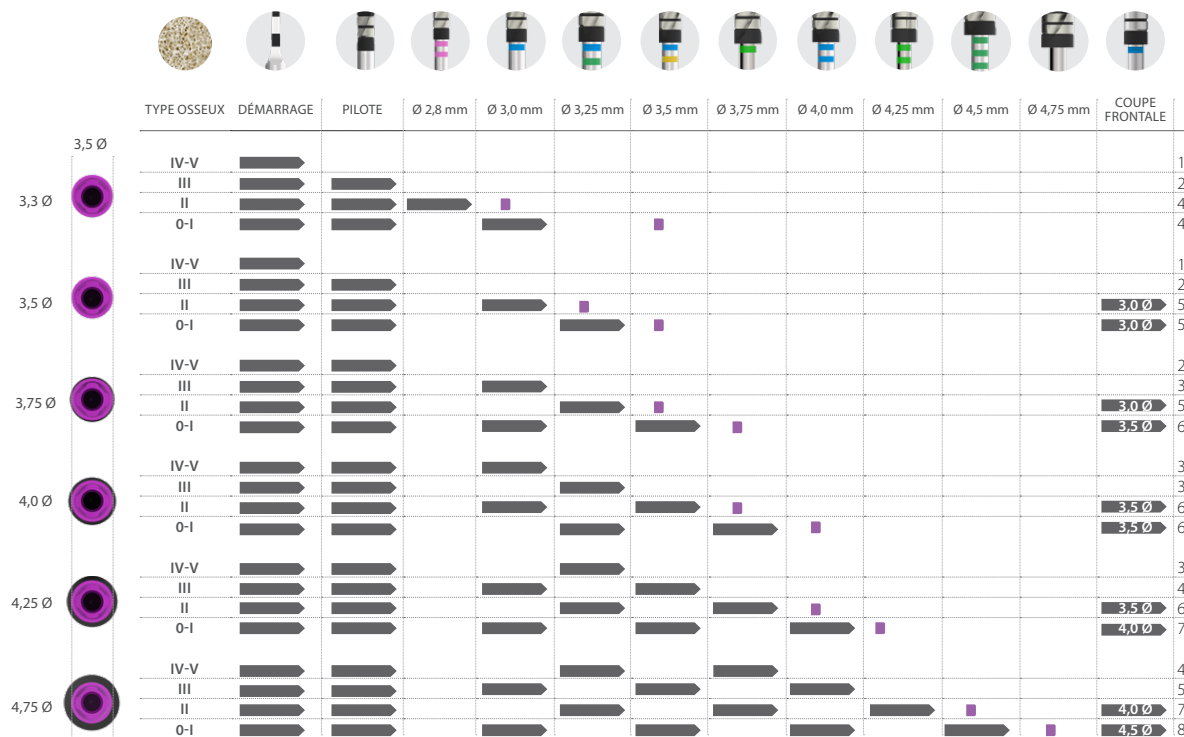

# Implants de longueur

(de 6,5 à 13 mm)

Longueur totale de l'implant  
 5,5 mm de profondeur de forage  
 2-3 mm de profondeur

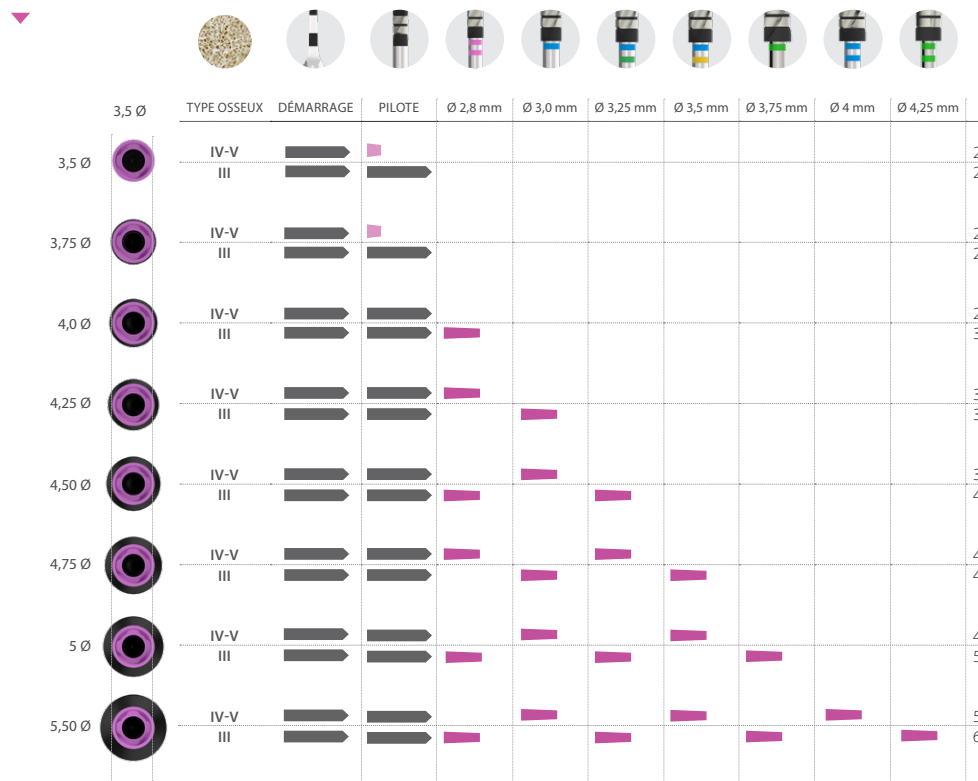

**IMPORTANT:**  
 Séquence de fraisage  
 valable uniquement pour  
 les implants **CORE-X**

forage  
 Séquences de






## Implants de longueur

(de 4,5 à 5,5 mm)

Longueur totale de l'implant  
2-3 mm de profondeur

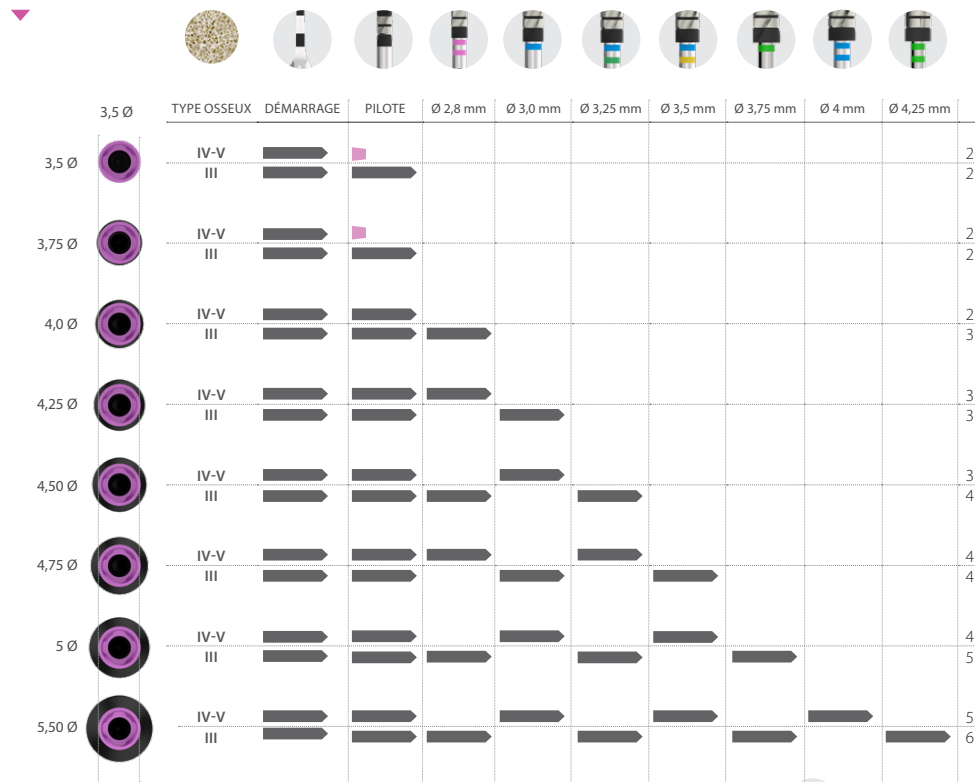

### IMPORTANT:



Séquence de fraisage  
valable uniquement pour  
les implants CORE-X





## Implants de longueur


(de 10 à 15 mm)

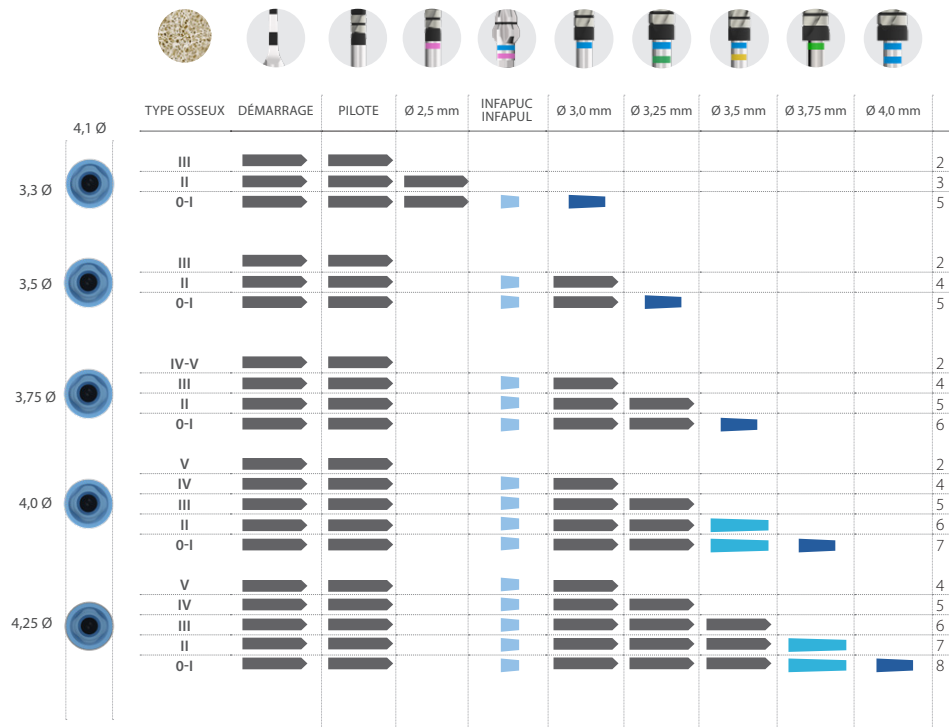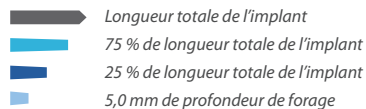

# Implants de longueur

(de 5,5 à 8,5 mm)

- Longueur totale de l'implant
- X,X Ø Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
- 5,0 mm de profondeur de forage
- 2-3 mm de profondeur de forage

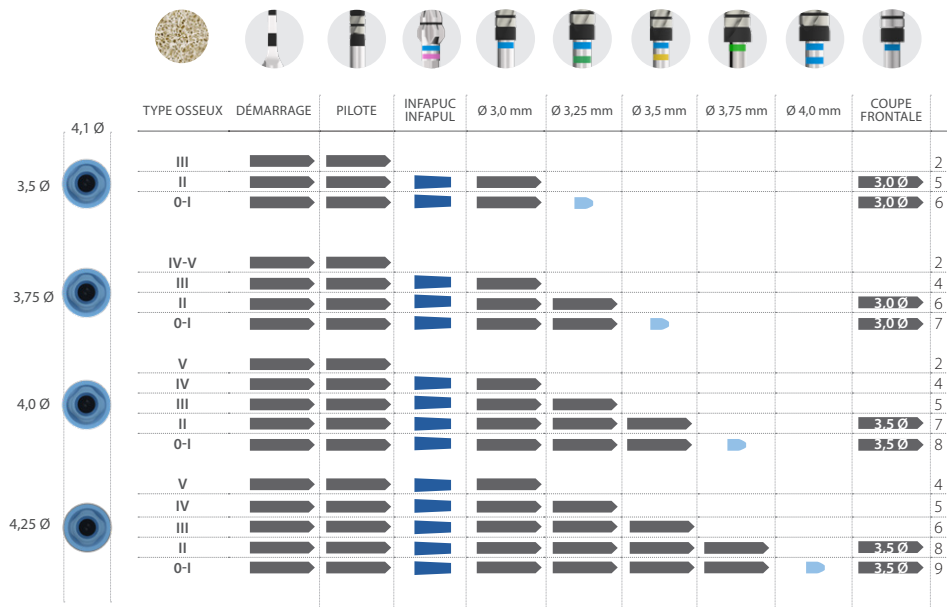




## Implants de longueur

(de 8,5 à 15 mm)



Longueur totale de l'implant  
6,5 mm de profondeur de forage  
3 mm de profondeur de forage

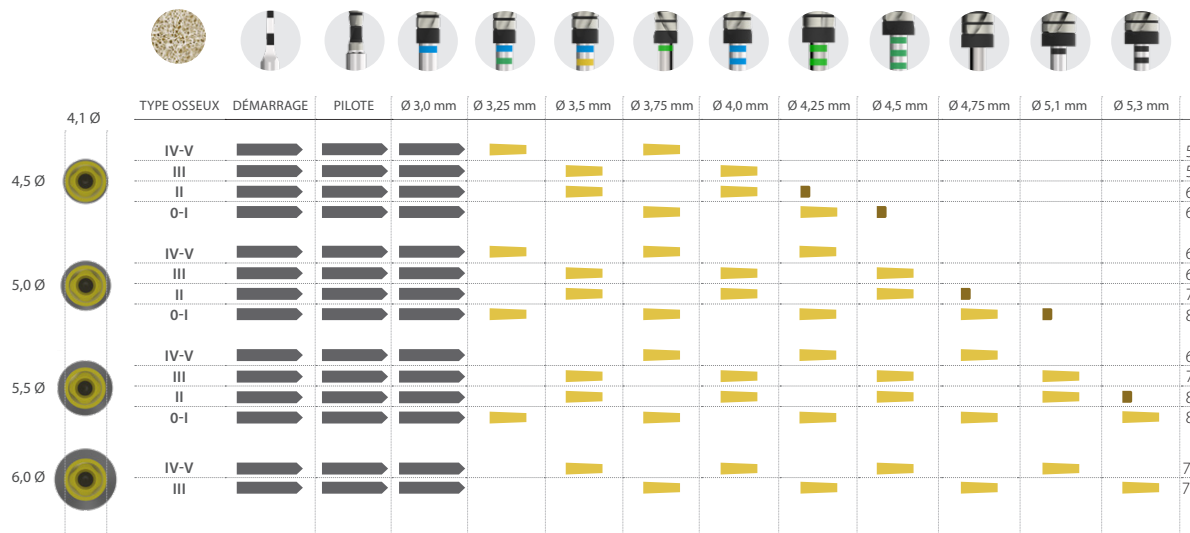












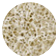









## Implants de longueur

(de 4,5 à 7,5 mm)



Longueur totale de l'implant  
X.X Ø Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié  
3 mm de profondeur de forage

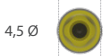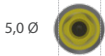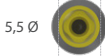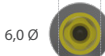																	
		TYPE OSSEUX	DÉMARRAGE	PILOTE	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	Ø 5,1 mm	Ø 5,3 mm		COUPE FRONTALE	
4,1 Ø																	
4,5 Ø		IV-V															5
		III															5
		II														4,0 Ø	7
		0-I														4,0 Ø	7
5,0 Ø		IV-V															6
		III															6
		II														4,5 Ø	8
		0-I														4,5 Ø	9
5,5 Ø		IV-V															6
		III															7
		II														5,1 Ø	9
		0-I														5,1 Ø	9
6,0 Ø		IV-V															7
		III															7



