



Συνιστώμενος οδηγός ακολουθίας διάτρησης

για εμφυτεύματα Interna BTI



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συμβουλευτείτε το διανομέα σας για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις διάφορες αγορές

Σημάδια βάθους φρέζας

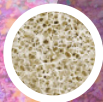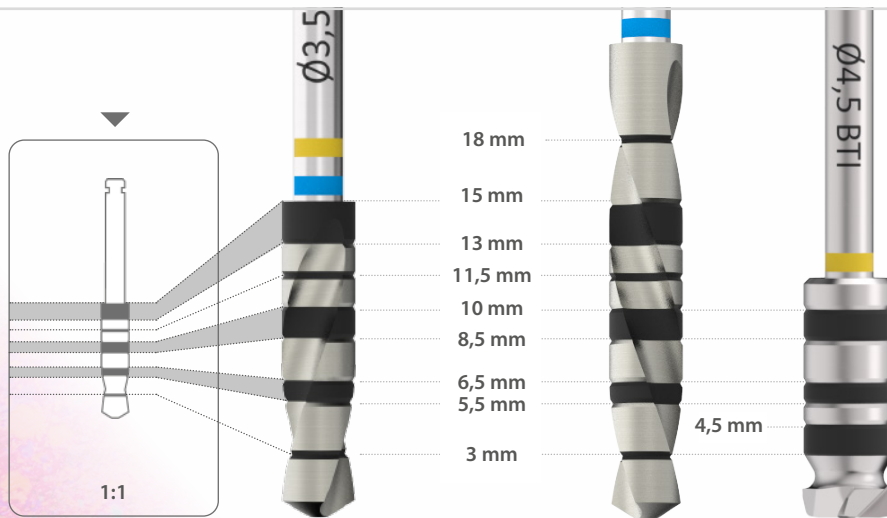

Κλάση/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

ΦΡΕΖΑ

Αρχικό τρύπανο
τρύπανο

Τρύπανο διεύρυνσης

Τρύπανο εμπρόσθιας κοπής

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΗ

ναι

όχι

όχι


όχι

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 6,5 έως 13 mm)



 Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
 Βάθος διάτρησης 6,5 mm
 Βάθος διάτρησης 2-3 mm

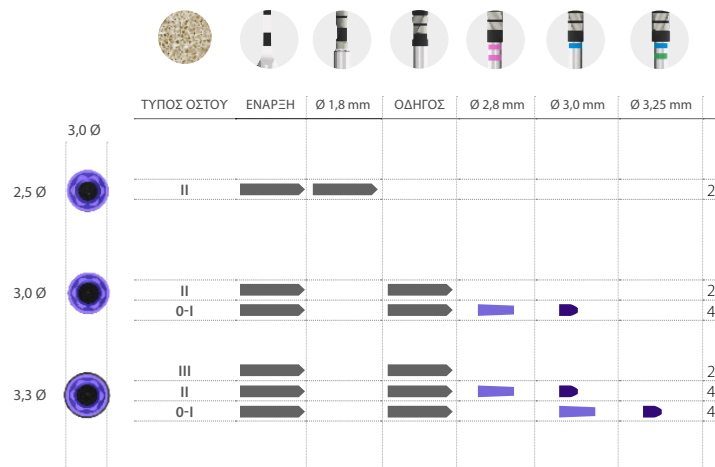


Μήκη εμφυτευμάτων

(5,5 mm)




Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
Βάθος διάτρησης 2-3 mm

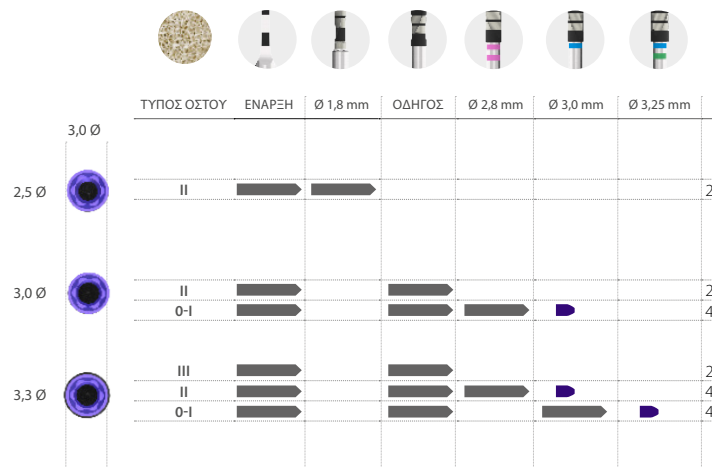

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 7,5 έως 15 mm)


 Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
 Βάθος διάτρησης 6,5 mm
 Βάθος διάτρησης 2-3 mm

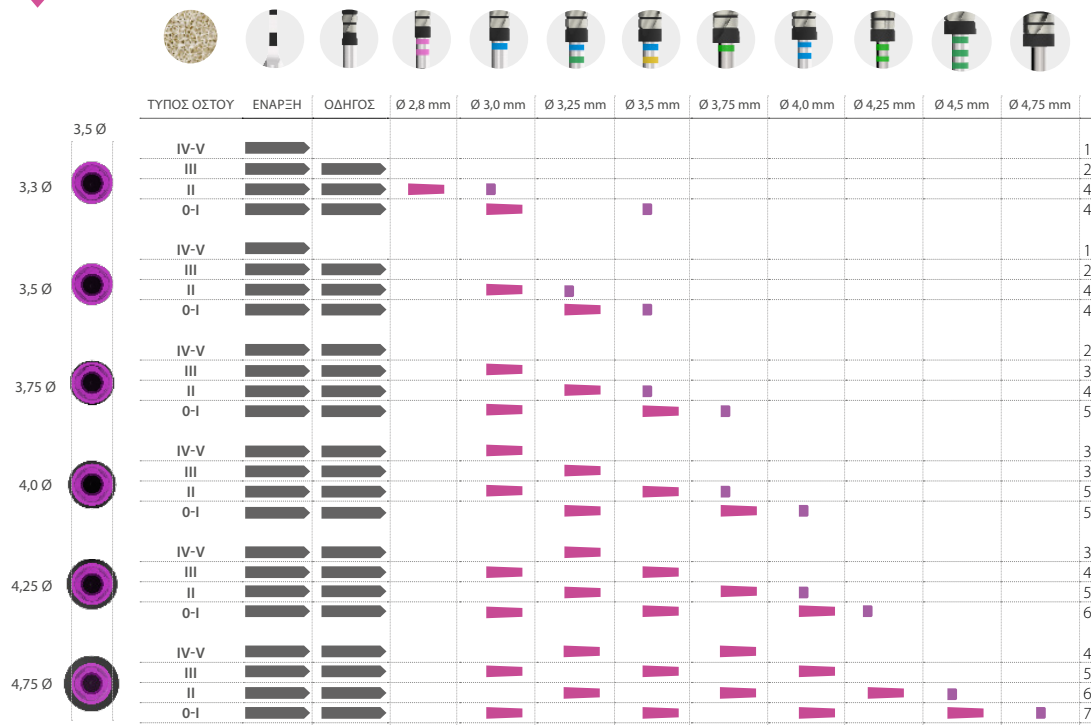

Μήκη εμφυτευμάτων

▼ (από 4,5 έως 6,5 mm)

 Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
 X,X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
 Βάθος διάτρησης 2-3 mm

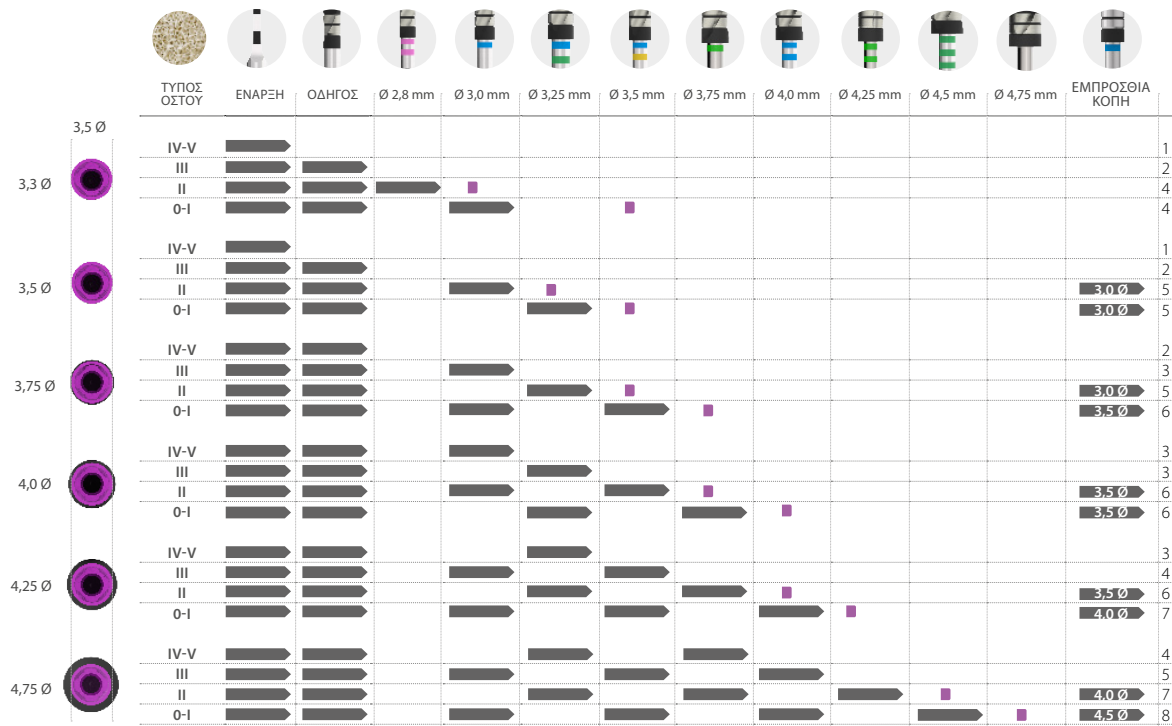

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 6,5 έως 13 mm)

 Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
 Βάθος διάτρησης 5,5 mm

		ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΟΥ	ΕΝΑΡΞΗ	ΟΔΗΓΟΣ	Ø 2,8 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	
3,5 Ø		IV-V III	 						1 2
4,0 Ø		IV-V III	 	 					2 3
4,25 Ø		IV-V III	 	 					3 3
4,50 Ø		IV-V III	 	 					3 4
4,75 Ø		IV-V III	 	 					4 4



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η αλληλουχία φρεζαρίσματος
 ισχύει μόνο για τα εμφυτεύματα
 CORE-X®

διάτρησης
 Οδηγός ακολουθίας

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 4,5 έως 5,5 mm)


 Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος

		 ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΟΥ	 ΕΝΑΡΞΗ	 ΟΔΗΓΟΣ	 Ø 2,8 mm	 Ø 3,0 mm	 Ø 3,25 mm	 Ø 3,5 mm	
3,5 Ø		IV-V							1
3,75 Ø		III							2
4,0 Ø		IV-V							2
		III							3
4,25 Ø		IV-V							3
		III							3
4,50 Ø		IV-V							3
		III							4
4,75 Ø		IV-V							4
		III							4



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η αλληλουχία φρεζαρίσματος
 ισχύει μόνο για τα εμφυτεύματα
 CORE-X®




Μήκη εμφυτευμάτων

(από 10 έως 15 mm)



- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- 75% του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- 25 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- Βάθος διάτρησης 5,0 mm

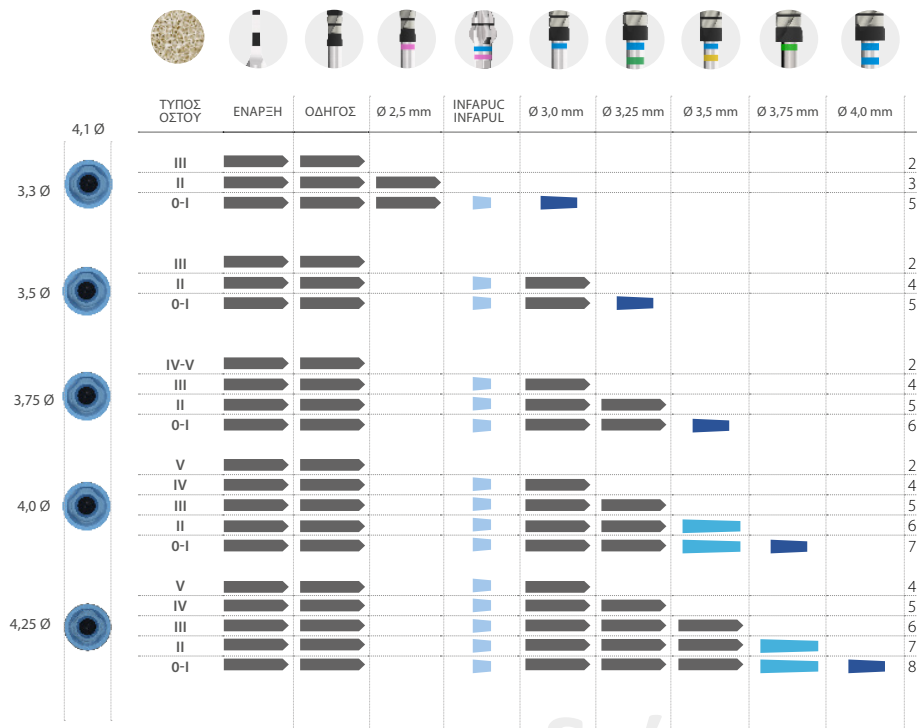


διάτρησης
Οδηγός ακολουθίας

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 5,5 έως 8,5 mm)

- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- X,X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
- Βάθος διάτρησης 5,0 mm
- Βάθος διάτρησης 2-3 mm

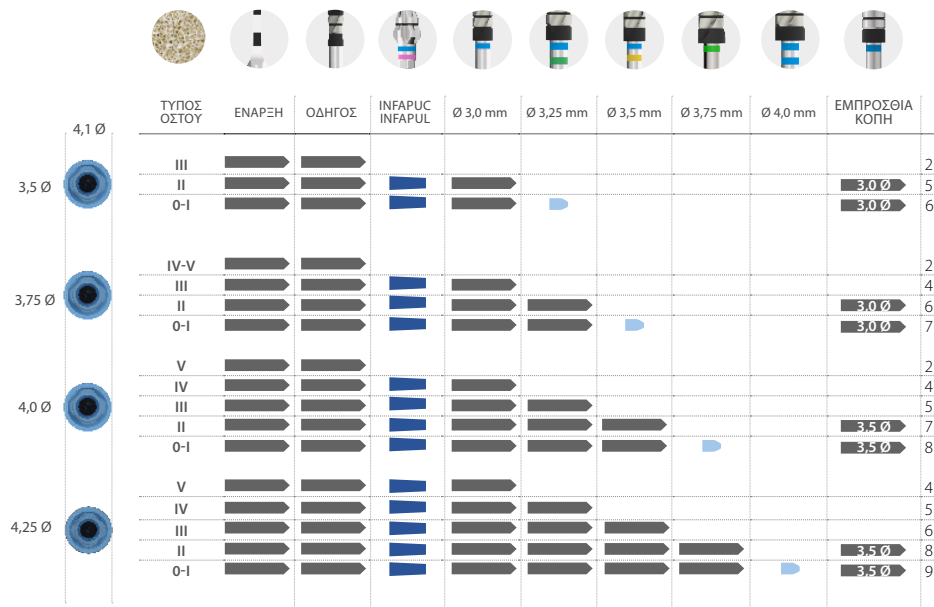


Μήκη εμφυτευμάτων

(από 8,5 έως 15 mm)



Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
Βάθος διάτρησης 6,5 mm
Βάθος διάτρησης 3 mm

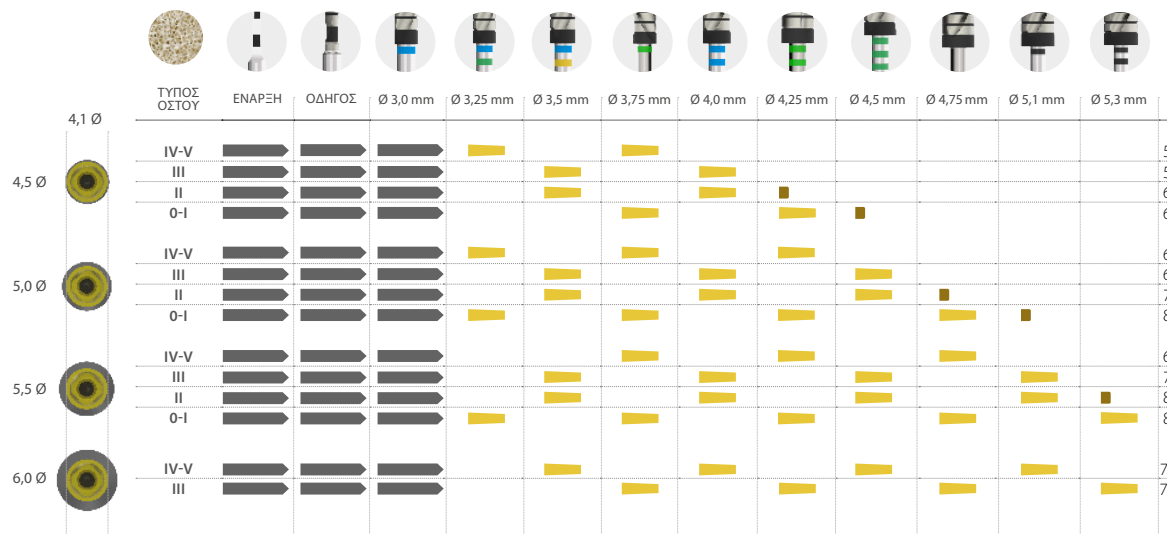

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 4,5 έως 7,5 mm)

- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- X,X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
- Βάθος διάτρησης 3 mm

		ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΟΥ	ΕΝΑΡΞΗ	ΟΔΗΓΟΣ	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	Ø 5,1 mm	Ø 5,3 mm	ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΟΠΗ	
4,1 Ø																
4,5 Ø	IV-V															5
	III															5
	II														4,0 Ø	7
	0-I														4,0 Ø	7
5,0 Ø	IV-V															6
	III															6
	II														4,5 Ø	8
	0-I														4,5 Ø	9
5,5 Ø	IV-V															6
	III															7
	II														5,1 Ø	9
	0-I														5,1 Ø	9
6,0 Ø	IV-V															7
	III															7