



Séquences de forage recommandées

pour implants BTI Interna



REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.

Marques de profondeur de forage

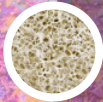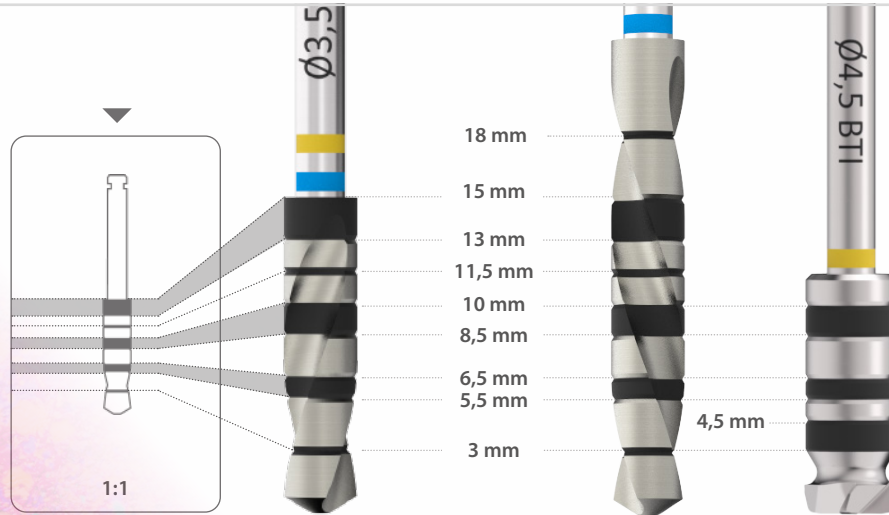

Type/Hounsfield

- I 1050 - 1400
- II 850 - 1000

- III 550 - 800
- IV 400 - 500
- V 100 - 350

FORET

- Foret de démarrage
- Forets
- Fraises cuvette
- Foret coupe frontale

VITESSE

- 800 - 1.000 rpm
- 50 - 75 rpm
- 150 - 200 rpm
- 50 - 75 rpm


IRRIGATION

- oui
- non
- non
- non

Implants de longueur (de 6,5 à 13 mm)



 Longueur totale de l'implant
 6,5 mm de profondeur de forage
 2-3 mm de profondeur de forage

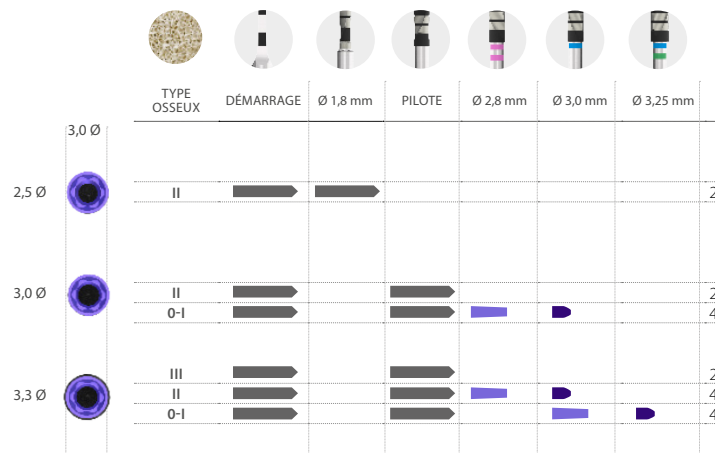


Implants de longueur

(5,5 mm)




Longueur totale de l'implant
2-3 mm de profondeur de forage

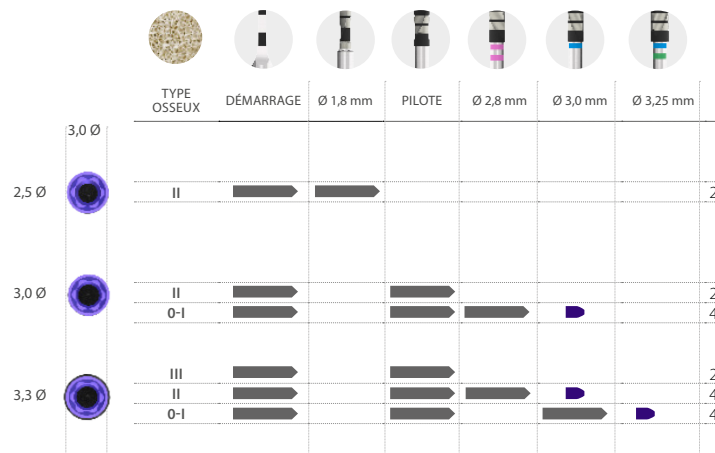


Implants de longueur (de 7,5 à 15 mm)

Longueur totale de l'implant
6,5 mm de profondeur de forage
2-3 mm de profondeur de forage

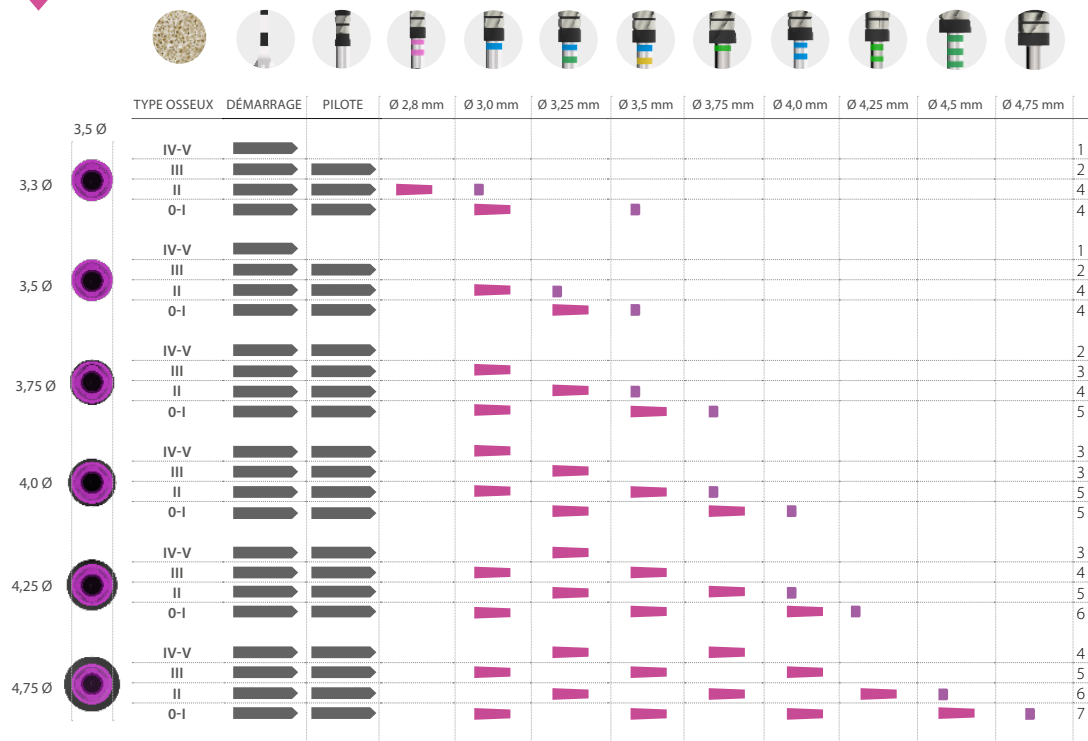


Implants de longueur (de 4,5 à 6,5 mm)

- Longueur totale de l'implant
- X.X Ø Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
- 2-3 mm de profondeur de forage

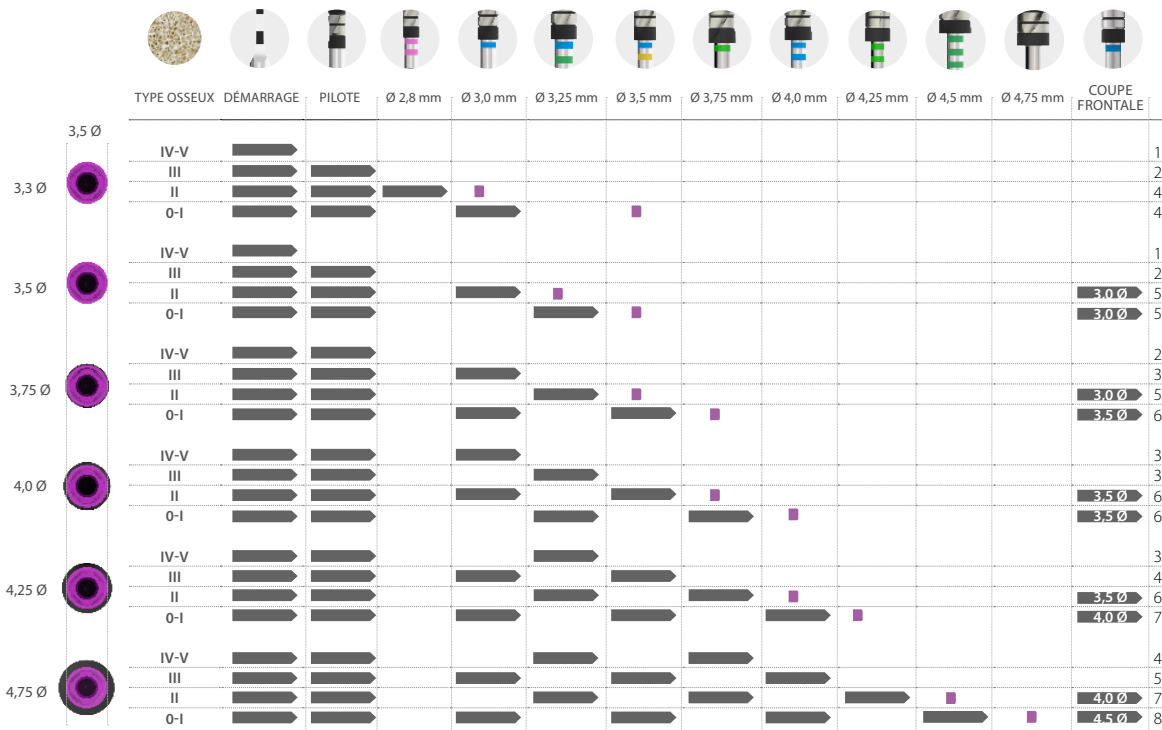

Implants de longueur (de 6,5 à 13 mm)

 Longueur totale de l'implant
 5,5 mm de profondeur de forage

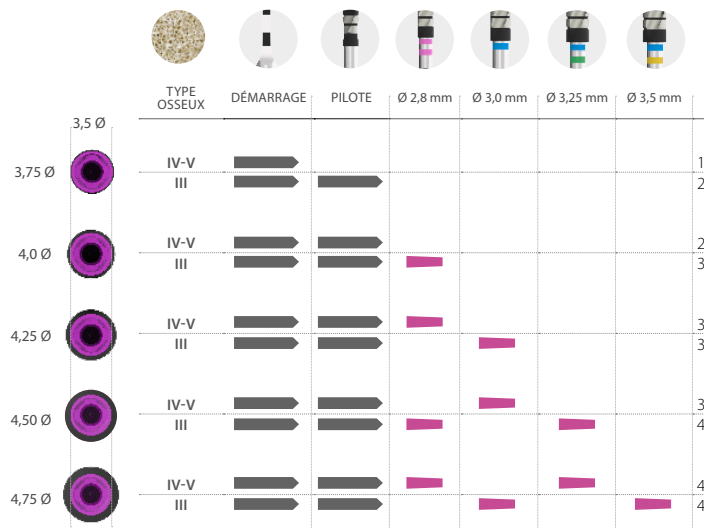

IMPORTANT:
 Séquence de fraisage valable
 uniquement pour les implants
 CORE-X®

Implants de longueur (de 4,5 à 5,5 mm)



Longueur totale de l'implant

		TYPE OSSEUX	DÉMARRAGE	PILOTE	Ø 2,8 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	
3,5 Ø									
3,75 Ø		IV-V III							1 2
4,0 Ø		IV-V III							2 3
4,25 Ø		IV-V III							3 3
4,50 Ø		IV-V III							3 4
4,75 Ø		IV-V III							4 4



IMPORTANT:
 Séquence de fraisage valable
 uniquement pour les implants
 CORE-X®


Implants de longueur (de 10 à 15 mm)

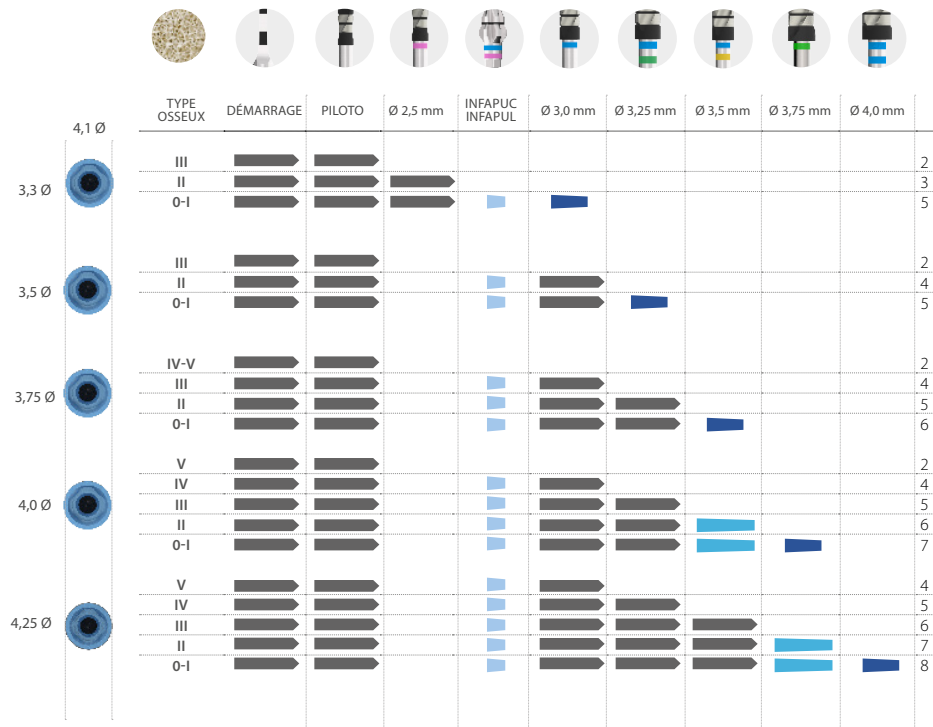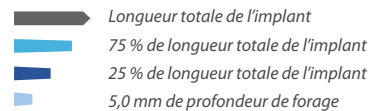

forage
Séquences de

Implants de longueur (de 5,5 à 8,5 mm)


- Longueur totale de l'implant
- Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
- 5,0 mm de profondeur de forage
- 2-3 mm de profondeur de forage

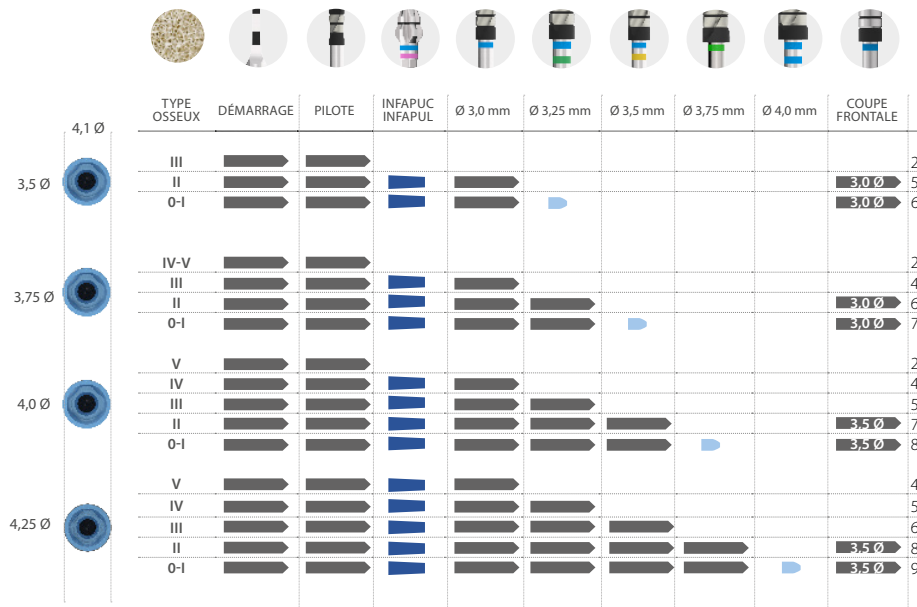

Implants de longueur (de 8,5 à 15 mm)



Longueur totale de l'implant
6,5 mm de profondeur de forage
3 mm de profondeur de forage

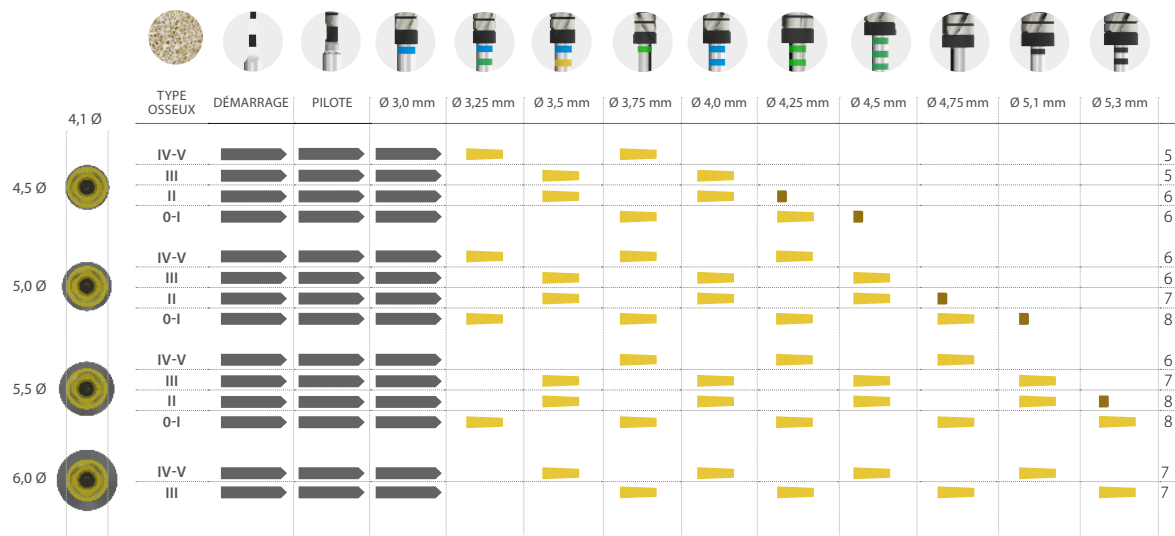

Implants de longueur (de 4,5 à 7,5 mm)

Longueur totale de l'implant
X,X Ø Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
3 mm de profondeur de forage

