


Συνιστώμενος οδηγός ακολουθίας διάτρησης

για εμφυτεύματα *Externa BTI*



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συμβουλευτείτε το διανομέα σας για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις διάφορες αγορές

Σημάδια βάθους φρέζας

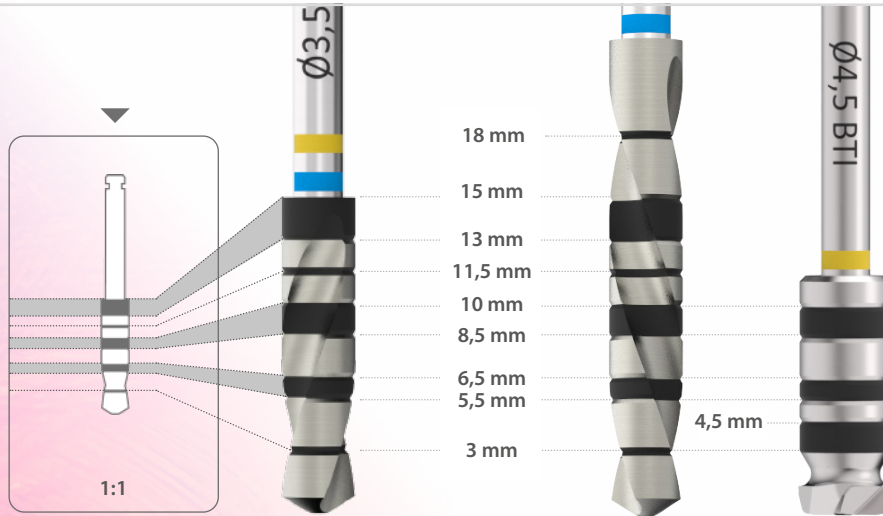

Κλάση/Hounsfield

I1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

ΦΡΕΖΑ

Αρχικό τρύπανο
τρύπανο

Τρύπανο διεύρυνσης

Τρύπανο εμπρόσθιας κοπής

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΗ

ναι

όχι

όχι

όχι

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 10 έως 15 mm)



Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
75 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
25 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
Βάθος διάτρησης 5,0 mm

Μήκη εμφυτευμάτων

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)





Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
 Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
 Βάθος διάτρησης 5 mm (δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μήκος 4,5 mm)

	3,5 Ø	ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΟΥ	ΕΝΑΡΞΗ	Ø 1,8 mm	ΟΔΗΓΟΣ	Ø 2,5 mm	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΟΠΗ
		II									2
2,5 Ø		0-I									2
		II									2
3,0 Ø		0-I									3
		III									2
3,3 Ø		II									3
		0-I									5
		III									2
3,5 Ø		II									4
		0-I									5
		IV-V									2
3,75 Ø		III									5
		II									6
		0-I									7

διάτρησης
Οδηγός ακολουθίας

Μήκη εμφυτευμάτων


(από 10 έως 15 mm)

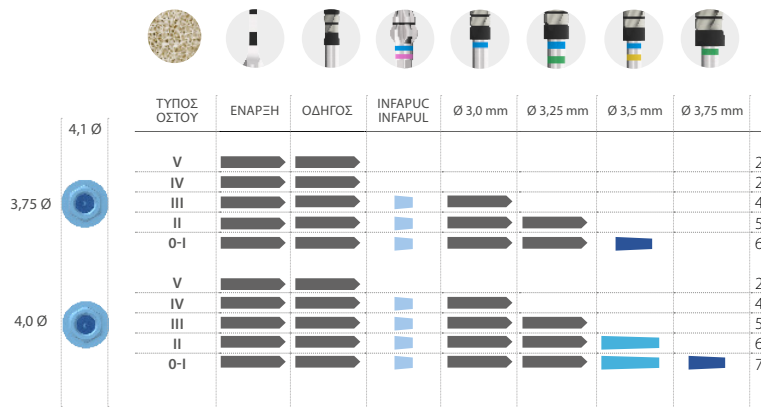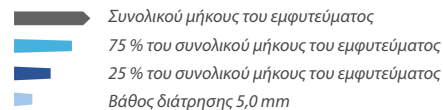

Μήκη εμφυτευμάτων

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)


- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- X.X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
- Βάθος διάτρησης 5,0 mm
- Βάθος διάτρησης 2-3 mm

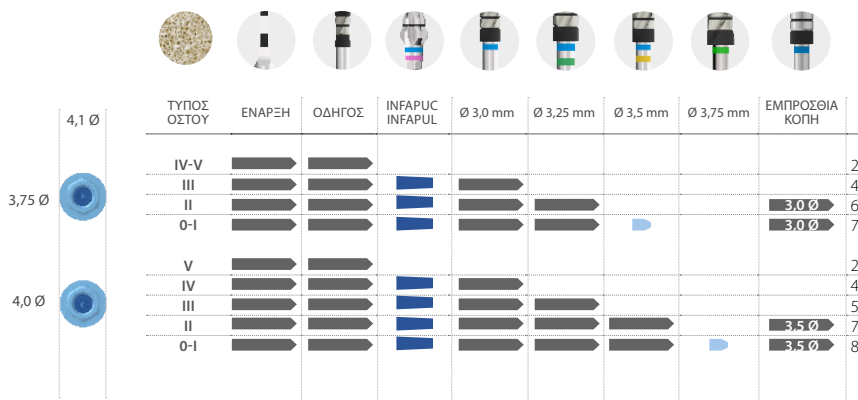

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 10 έως 15 mm)

- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- 75 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- 25 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- Βάθος διάτρησης 4,5 mm

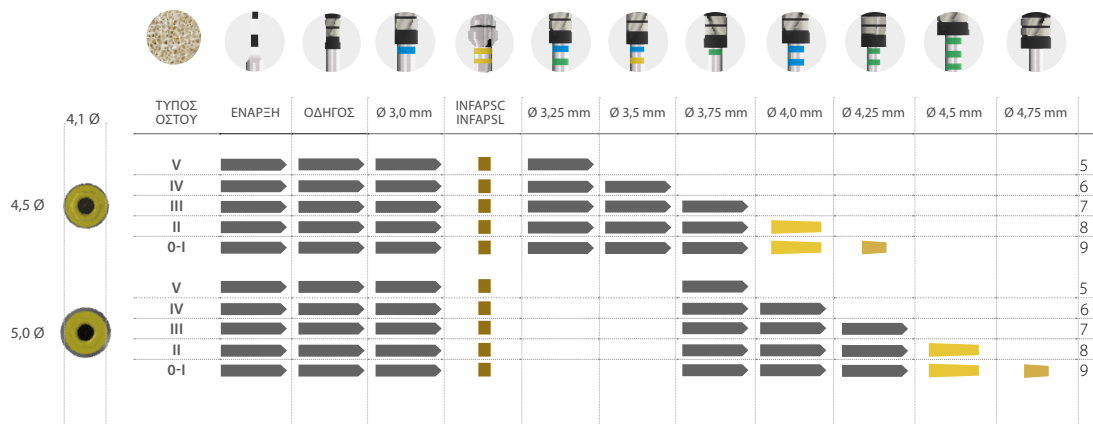

Μήκη εμφυτευμάτων

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
X,X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
Βάθος διάτρησης 4,5 mm

