


Συνιστώμενος οδηγός ακολουθίας διάτρησης

για εμφυτεύματα *Externa BTI*



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συμβουλευτείτε το διανομέα σας για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στις διάφορες αγορές

Σημάδια βάθους φρέζας

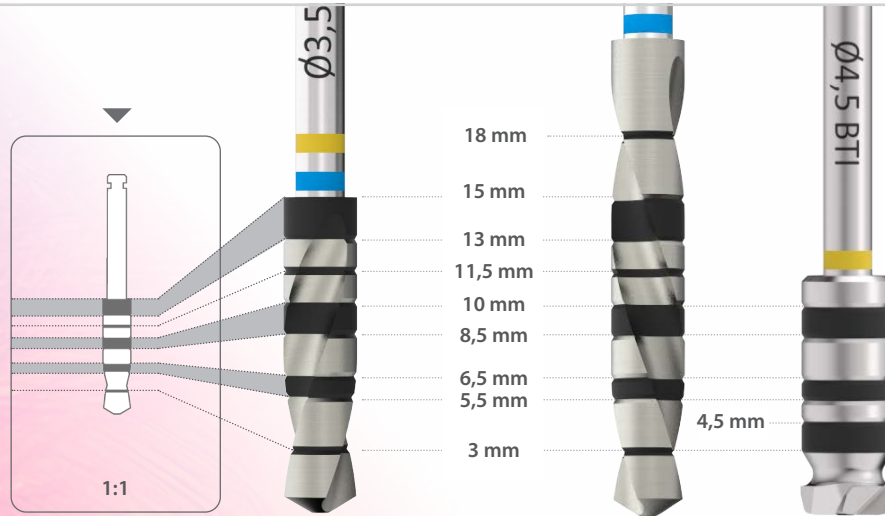

ΚΛΑΣΗ / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

ΦΡΕΖΑ

Αρχικό τρύπανο
τρύπανο
Τρύπανο διεύρυνσης
Τρύπανο εμπρόσθιας κοπής

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΗ

ναι
όχι
όχι
όχι

Μήκη εμφυτευμάτων

(από 10 έως 15 mm)



■ Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
■ 75 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
■ 25 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
■ Βάθος διάτρησης 5,0 mm

Μήκη εμφυτευμάτων



(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
X.X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
Βάθος διάτρησης 5 mm (δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μήκος 4,5 mm)

											
	ΤΥΠΟΣ ΟΣΤΟΥ	ΕΝΑΡΞΗ	Ø 1,8 mm	ΟΔΗΓΟΣ	Ø 2,5 mm	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΚΟΠΗ	
3,5 Ø											
2,5 Ø	II	→	→								2
	0-I	→	→								2
3,0 Ø	II	→	→								2
	0-I	→	→	→							3
3,3 Ø	III	→		→							2
	II	→		→	→						3
	0-I	→		→	→		→			3,0 Ø	5
3,5 Ø	III	→		→							2
	II	→		→			→			3,0 Ø	4
	0-I	→		→			→	→		3,0 Ø	5
3,75 Ø	IV-V	→		→							2
	III	→		→			→			3,0 Ø	5
	II	→		→			→	→		3,0 Ø	6
	0-I	→		→			→	→	→	3,5 Ø	7

Μήκη εμφυτευμάτων


(από 10 έως 15 mm)

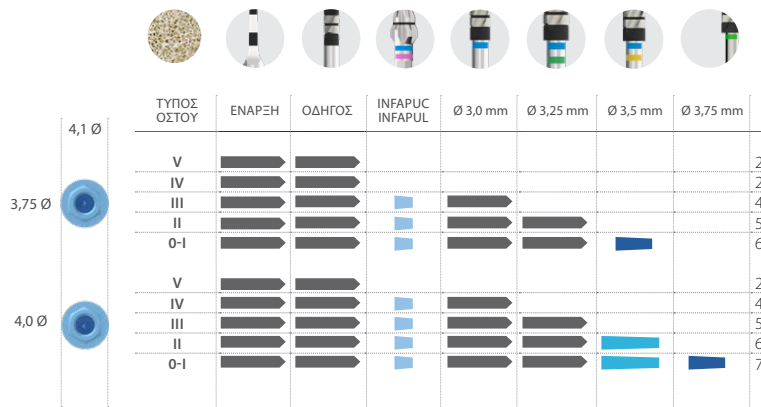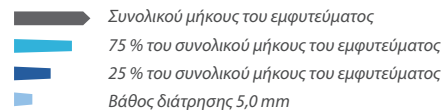

Μήκη εμφυτευμάτων

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- X,X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
- Βάθος διάτρησης 5,0 mm
- Βάθος διάτρησης 2-3 mm

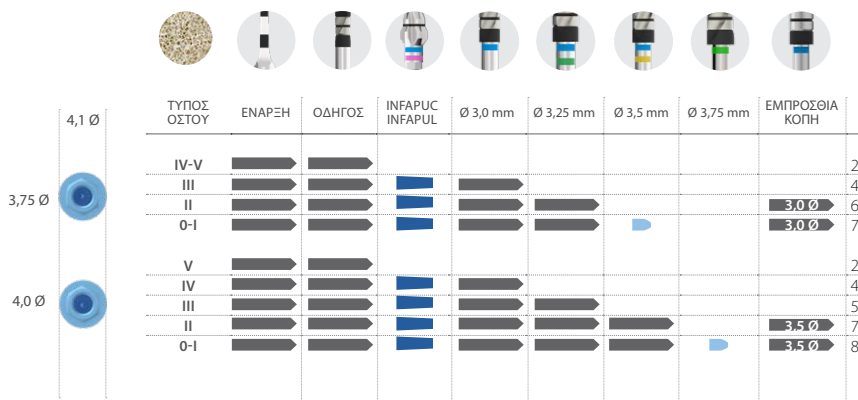


Μήκη εμφυτευμάτων

(από 10 έως 15 mm)



- Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- 75 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- 25 % του συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
- Βάθος διάτρησης 4,5 mm

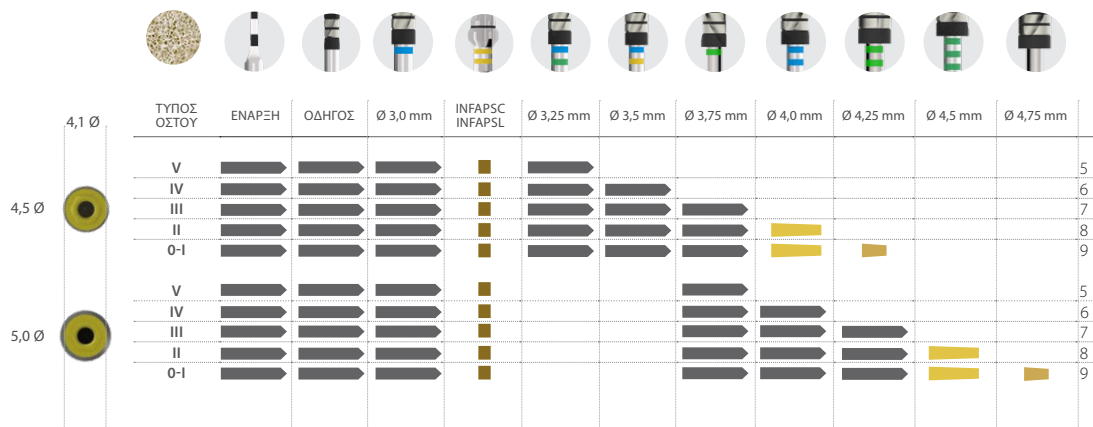

Μήκη εμφυτευμάτων

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Συνολικού μήκους του εμφυτεύματος
X,X Ø Συνολικό μήκος του εμφυτεύματος με τρύπανο συγκεκριμένης διαμέτρου
Βάθος διάτρησης 4,5 mm

