


Anbefalt boresekvensguide

for Externa BTI-implantater



MERK: Ta kontakt med din distributør for å få informasjon om tilgjengeligheten av produktet i de ulike markedene

Boredybdemerker

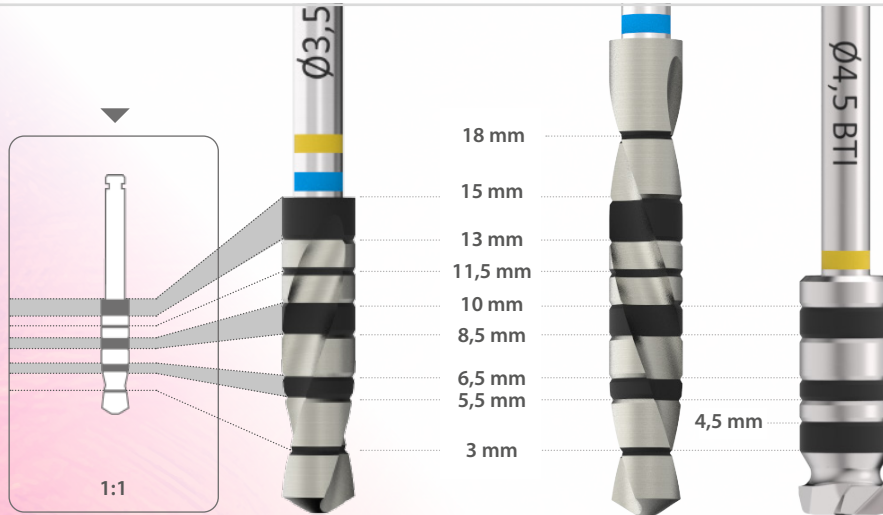

Klasse/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

BOR

Første boring

Bor

Forskningsbor

Frontskjærende bor

REVOLUSJONER

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

IRRIGASJON

ja

nei

nei

nei



Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)



-  Total lengde på implantatet
-  75 % av den totale lengden på implantatet
-  25 % av den totale lengden på implantatet
-  5,0 mm boreddybde





Implantatlengder

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)




Total lengde på implantatet



Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor





5 mm boreddybde (må ikke brukes i lengde på 4,5 mm)

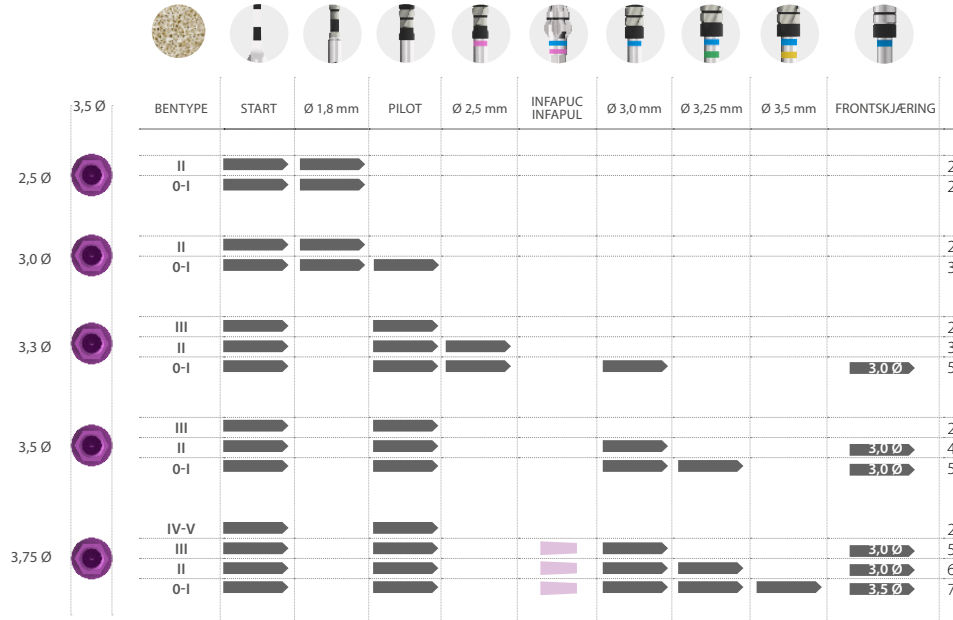

Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)

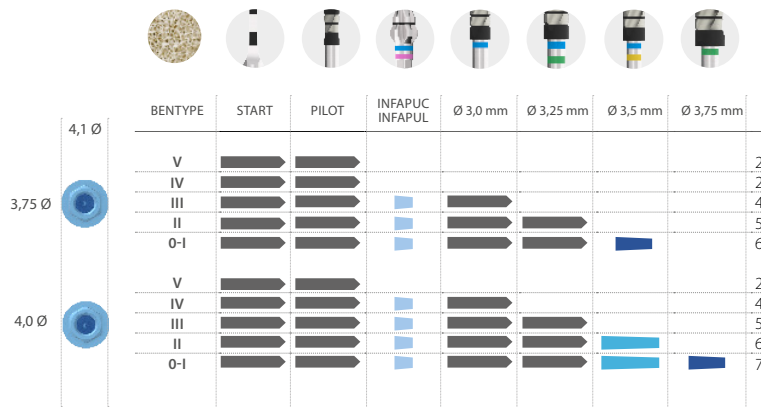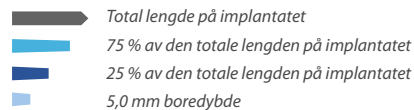

Boresekvensguide



Implantatlengder

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



Total lengde på implantatet



Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor



5,0 mm boreddybde



2-3 mm boreddybde




	BENTYPE	START	PILOT	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	FRONTSKJ/ERING	
4,1 Ø	IV-V									2
	III									4
3,75 Ø	II								3,0 Ø	6
	0-I								3,0 Ø	7
	V									2
	IV									4
4,0 Ø	III									5
	II								3,5 Ø	7
	0-I								3,5 Ø	8

Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)



-  Total lengde på implantatet
-  75 % av den totale lengden på implantatet
-  25 % av den totale lengden på implantatet
-  4,5 mm boreddybde

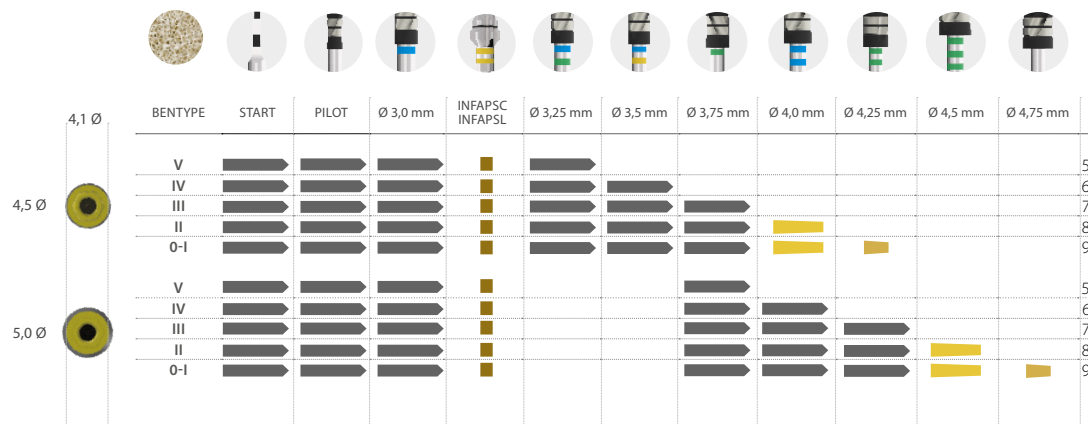

Boresekvensguide

Implantatlengder (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Total lengde på implantatet
 Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
 4,5 mm boreddybde

