


Anbefalt boresekvensguide

for Externa BTI-implantater



MERK: Ta kontakt med din distributør for å få informasjon om tilgjengeligheten av produktet i de ulike markedene

Boredybdemerker

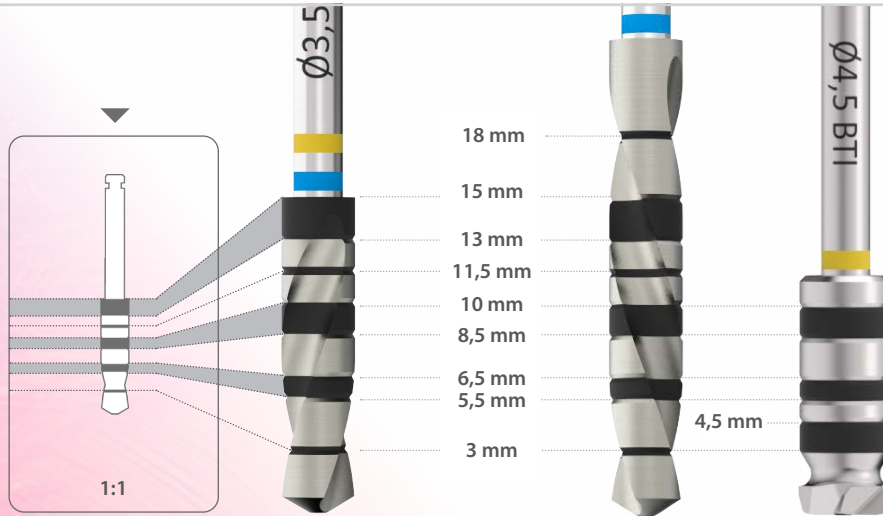

KLASSE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BOR

Første boring
 Bor
 Forskningsbor
 Frontskjærende bor

REVOLUSJONER

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

IRRIGASJON

ja
 nei
 nei
 nei



Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)



- Total lengde på implantatet
- 75 % av den totale lengden på implantatet
- 25 % av den totale lengden på implantatet
- 5,0 mm boreddybde





Implantatlengder

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)




Total lengde på implantatet

X,X Ø

Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor

5 mm boreddybde (må ikke brukes i lengde på 4,5 mm)

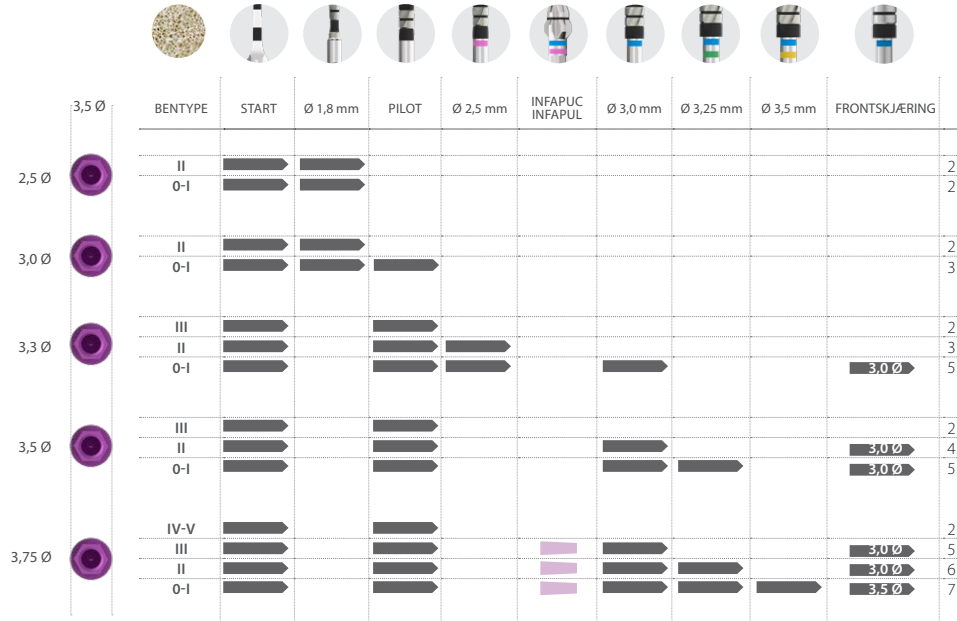



Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)



-  Total lengde på implantatet
-  75 % av den totale lengden på implantatet
-  25 % av den totale lengden på implantatet
-  5,0 mm boreddybde



	BENTYPE	START	PILOT	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	
4,1 Ø	V								2
	IV								2
3,75 Ø	III								4
	II								5
	0-I								6
4,0 Ø	V								2
	IV								4
	III								5
	II								6
	0-I								7



Implantatlengder

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



Total lengde på implantatet

Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor

5,0 mm boredybde

2-3 mm boredybde




	BENTYPE	START	PILOT	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	FRONTSKJÆRING	
4,1 Ø	IV-V									2
	III									4
3,75 Ø	II								3,0 Ø	6
	0-I								3,0 Ø	7
	V									2
	IV									4
4,0 Ø	III									5
	II								3,5 Ø	7
	0-I								3,5 Ø	8

Implantatlengder

(fra 10 til 15 mm)




-  Total lengde på implantatet
-  75 % av den totale lengden på implantatet
-  25 % av den totale lengden på implantatet
-  4,5 mm boreddybde

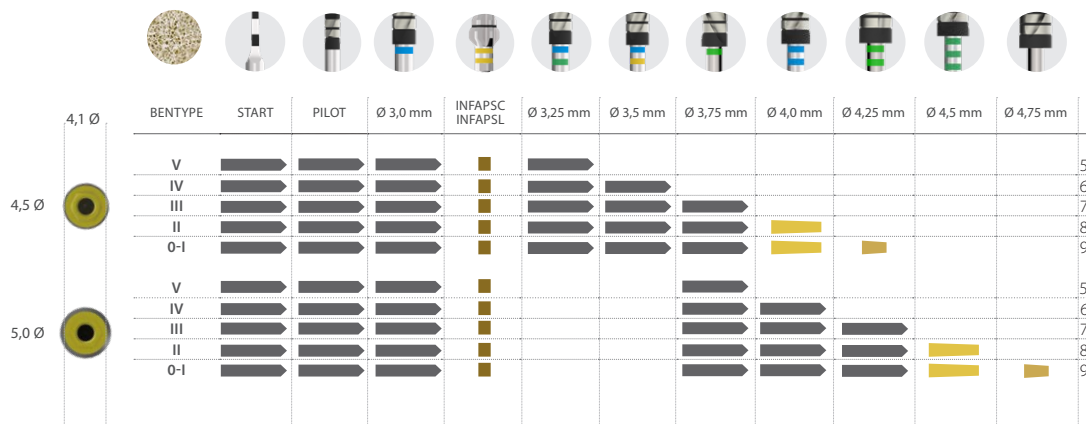

Boresekvensguide

Implantatlengder (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Total lengde på implantatet
 Total lengde på implantatet med spesifisert diameterbor
 4,5 mm boreddybde

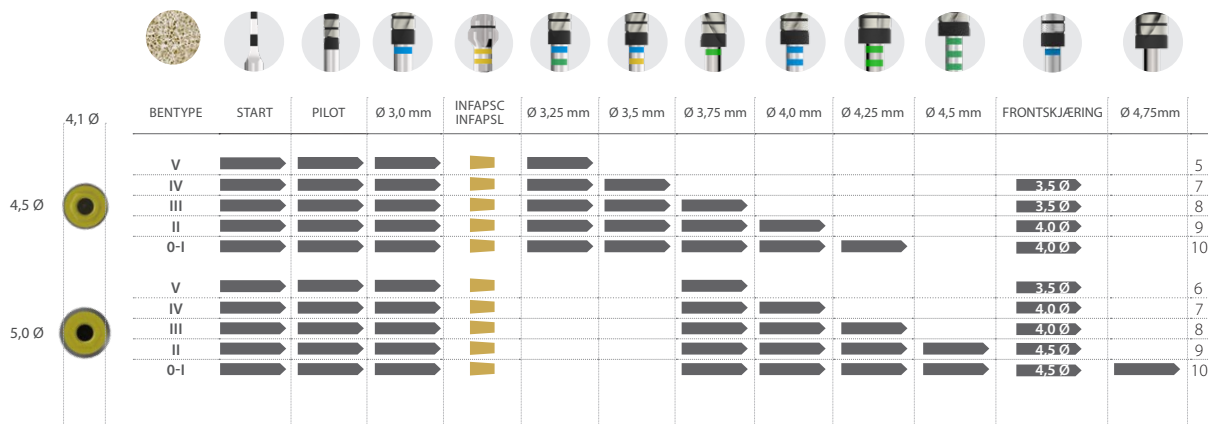

Boresekvensguide